

Методические рекомендации для преподавателей по использованию манекена–симулятора для отработки навыков пункции спинного мозга и эпидуральной пункции P10450



ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

Рассмотрено на заседании ЦПН
 Протокол № 5 от 08.12 2020 г.
 Руководитель ЦПН [Signature] Абдраимова С.Е.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

Комплектация:

№	Наименование	Ед.измерения	Количество
1	Манекен	шт.	1
2	Сетевой адаптер 12V	шт.	1
3	Сменная запасная кожа-накладка	шт.	2
4	Сменный запасной модуль спинного мозга	шт.	2
5	Шприц 5 мл.	шт.	2
6	Мешок для жидкости	шт.	1
7	Зажим для трубок	шт.	4

Наименование: Манекен–симулятор для отработки навыков пункции спинного мозга и эпидуральной пункции P10450

Введение: Данный манекен предназначен для отработки навыков пункции спинного мозга и эпидуральной пункции. Тренажер подходит для применения в медицинских ВУЗах, колледжах и у клиницистов. Тренажер характеризуется реалистичной формой, точной анатомической структурой, мультифункциональностью, применением материала с улучшенными свойствами и прочностью. Поясничный отдел позвоночника и кожа являются съемными.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

Характеристика:

1. Реалистичные на вид и ощупь материалы.
2. Реалистичные анатомические ориентиры.
3. Отработка навыков пункции спинного мозга.
4. Отработка навыков эпидуральной пункции.
5. Заменяемая кожа манекена и модули спинного мозга.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

Подготовка к работе:

При эксплуатации тренажер должен быть защищен от ударов.

Избегайте использования фломастеров, чернильных ручек, ацетона, йода и других красящих веществ и предметов, не укладывайте тренажер на газетную бумагу или любые окрашенные поверхности.

Установите манекен на правый бок на ровной горизонтальной поверхности.

Подсоедините мешок для жидкости (заранее наполненный жидкостью) к отверстию расположенному на левой руке (находится сверху на левой руке закрытый пробкой).

Подключите сетевой адаптер к манекену (гнездо подключения расположено на левой руке) и включите его в сеть (заработает встроенный насос).

Когда насос закачает необходимое количество жидкости, приступайте к отработке навыков.