

**Методические рекомендации для преподавателей по
использованию тренажера для отработки навыков
внутримышечных инъекций в ягодицу «ИНМЭН-1»
(P10500)**

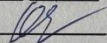


ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	
 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков Методические рекомендации для преподавателей	044/28-

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	
 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков Методические рекомендации для преподавателей	044/28-

Рассмотрено на заседании ЦПН

Протокол № 5 от 08 12 2020 г.

Руководитель ЦПН  Абдраимова С.Е.

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

Наименование: Тренажер отработки навыков внутримышечных инъекций в ягодичу «ИНМЭН-1»

Введение: Этот тренажер разработан для обучения и отработки навыков внутримышечных инъекций в ягодичную область, а также постановки клизмы. Тренажер был разработан с учетом анатомических принципов строения. Продукт характеризуется преимуществами иностранных товаров, качественным материалом и реалистичным выполнением манипуляций. Качественное изготовление должно обеспечить множество тренировочных сессий при должном уходе, соблюдении мер безопасности и особенностей эксплуатации.

Комплектация:

№	Наименование	Ед.измерения	Количество
1	Тренажер	шт.	1
2	Резервуар для жидкости	шт.	1
3	Ректальный зонд	шт.	1
4	Гель-смазка	шт.	1
5	Шприц 5 мл.	шт.	1

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

Характеристика: Тренажер представляет собой ягодичную область взрослого человека, созданный в соответствии с анатомическим строением и с четкими ориентирами, и предоставляет возможность для отработки навыков внутримышечных инъекций. Тренажер характеризуется реалистичной симуляцией, реалистичным клиническими ощущениями и чувством сопротивления при инъекции.

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

Подготовка манекена к эксплуатации:

При эксплуатации тренажер должен быть защищен от ударов.

Избегайте использования фломастеров, чернильных ручек, ацетона, йода и других красящих веществ и предметов, не укладывайте тренажер на газетную бумагу или любые окрашенные поверхности.

1. Установите тренажер на ровную горизонтальную поверхность.
2. Сделайте инъекцию согласно правилам