

**Методические рекомендации для преподавателей  
по использованию тренажера для отработки  
навыков тирокрикоцентеза, крикотиротомии и  
трахеостомии P1013**



ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

Рассмотрено на заседании ЦПН  
 Протокол № 5 от 08.12 2020 г.  
 Руководитель ЦПН [Signature] Абдраимова С.Е.

№	Наименование	Ед.измерения	Количество
1	Тренажер	шт.	1
2	Сменный модуль хряща трахеи	шт.	5
3	Сменная кожа шеи	шт.	5

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

После окончания работы:

1. Необходимо протиреть тренажер чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой.
2. Тщательно просушить тренажер.

**Введение:** Данный тренажер, имитирующий голову и шею взрослого мужчины, спроектирован специально для отработки и оценки навыков тирокрикоцентеза и крикотиреотомии в медицинских ВУЗах, колледжах, клиниках. Модель мягкая, эластичная и создает реалистичные ощущения при проколе. Кожа и хрящи трахеи заменяемы. Изделие отличается качеством и надежностью.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

1. Тренажер имитирует голову и шею взрослого человека, отличается точным анатомическим строением.
2. Выделены кожа шеи и мускулатура.
3. Очевидные анатомические ориентиры на поверхности тела, можно прощупать перстневидный хрящ и кольца трахеи.
4. Положение лежа на спине, удобное для выполнения прокола.
5. Каждый заменяемый элемент может использоваться многократно.
6. В комплект входит 5 заменяемых хрящей трахеи, что дает студентам возможность длительной эксплуатации сменных элементов.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

При эксплуатации тренажер должен быть защищен от ударов.

Избегайте использования фломастеров, чернильных ручек, ацетона, йода и других красящих веществ и предметов, не укладывайте тренажер на газетную бумагу или любые окрашенные поверхности.

1. Установите тренажер на ровную горизонтальную поверхность в положении лежа на спине.
2. Обработайте модель тальком и вставьте кольца трахеи в углубление в передней части шеи.
3. Приложите кожу к тренажеру для подготовки к проколу.