

**Методические рекомендации для преподавателей по
использованию манекена-тренажера ВОЛОДЯ для
обучения навыкам СЛР с возможностью
регистрации результатов и их распечатки
(P4212CPR)**



Шымкент 2020

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

Рассмотрено на заседании ЦПН
 Протокол № 5 от 08 12 2020 г.
 Руководитель ЦПН Абдраимова С.Е.

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

7	Легочной мешок	шт.	2
8	Эндотрахеальная трубка	шт.	1
9	Гель-смазка	шт.	1
10	Flash-визитка с программой и каталогом	шт.	1
11	Персональная система управления (опционально)	компл.	1

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

Наименование: Манекен-тренажер ВОЛОДЯ для обучения навыкам СЛР с возможностью регистрации результатов и их распечатки (P4212CPR)

Введение: Манекен–тренажер «Володя» предназначен для отработки и оценки навыков сердечно-легочной реанимации. Основными преимуществами данного манекена-тренажера являются удобство в процессе эксплуатации, высокое качество и надежность.

Завершение работы:

После окончания работы:

1. Заккрыть программу.
2. Выключить кнопку электропитания.
3. Удалить загрязнения, протиреть тренажер чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой.
4. Тщательно просушить тренажер.

Комплектация:

№	Наименование	Ед.измерения	Количество
1	Тренажер	шт.	1
2	Кабель питания манекена	шт.	1
3	Кеды	шт.	1

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков Методические рекомендации для преподавателей	044/28-

Характеристика:

1. Программное обеспечение для контроля процесса проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР);
2. Симуляция естественных воздушных путей взрослого человека;
3. Интубация трахеи;
4. Подвижная челюсть;
5. Искусственная вентиляция и компрессия грудной клетки, сходные с естественными;
6. Реалистичные ориентиры мест компрессии;
7. Контроль положения рук;
8. Автономная работа;
9. Проводное или Wi-Fi соединение с планшетом или ноутбуком;
10. Реакция зрачков на свет;
11. Пульс на сонной артерии автоматический;
12. Возможность распечатки результата;
13. Возможность регулировки настроек тренажера;
14. Возможность дефибрилляции реальным дефибриллятором.

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков Методические рекомендации для преподавателей	044/28-

Подготовка манекена к эксплуатации:

При эксплуатации тренажер должен быть защищен от ударов.

Избегайте использования фломастеров, чернильных ручек, ацетона, йода и других красящих веществ и предметов, не укладываете тренажер на газетную бумагу или любые окрашенные поверхности. Для предотвращения возможного заражения студентов во время проведения практических занятий, рекомендуется использовать одноразовые лицевые маски при выполнении искусственного дыхания рот в рот.

1. Установите тренажер на ровную горизонтальную поверхность в положении лежа на спине.
2. Перед тем как приступить к полноценной работе рекомендуется зарядить тренажер полностью. Тренажер заряжается в течение 2-х часов.
3. Далее произвести состыковку с компьютером, можно произвести проводное или беспроводное соединение через Wi-Fi.
4. После запуска программного обеспечения манекена – тренажера, на рабочем столе компьютера появится окно раздела СЛР, в котором можно осуществить выбор между «Режимом экзамена» (A1) и «Учебным режимом» (A2) с правой стороны.