


**Методические рекомендации для преподавателей по
использованию тренажера для отработки навыков
наложения повязок на нижнюю половину туловища (P12)**

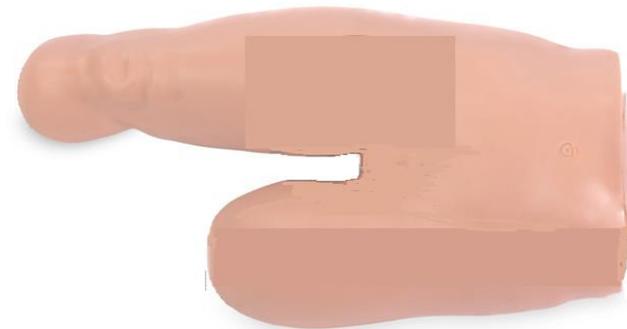

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

Рассмотрено на заседании ЦПН
 Протокол № 22 от 18 10 2021 г.
 Руководитель ЦПН: Алимбеков М.Е. *Alimbekov*

3	Бандаж	шт.	1
4	Сумка для транспортировки и хранения	шт.	1

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

1. Необходимо протереть манекен чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой;
2. Тщательно просушить тренажер;
3. Тренажер хранить в сухом, проветриваем помещении.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

Наименование: Тренажер для отработки навыков наложения повязок на нижнюю половину туловища (P12)

Введение: Тренажер имитирует пациента с двусторонней ампутацией нижних конечностей, правая нога ампутирована ниже колена, а левая ампутирована до середины бедра. Используется для получения навыков по наложению повязок на культю ампутированной конечности. Кожа гладкая, мягкая, сухая и упругая, что позволяет закрепить лейкопластырь. Модель используется в высших и средних специальных учреждениях медицинского образования, а также врачами больниц для демонстрации и обучения персонала наложению повязок.

Комплектация:

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

Характеристика:

- 1.Тренажер имитирует пациента с двусторонней ампутацией нижних конечностей.
2. Правая нога ампутирована ниже колена, левая нога ампутирована до середины бедра; модель может использоваться для получения навыков по наложению повязок на культю ампутированный конечности.
3. Тренажер удобен для наложения циркулярных, спиральных повязок на брюшную стенку, область ягодиц и подвздошный гребень.
4. Может использоваться для наложения циркулярных, спиральных повязок, повязки в форме цифры восемь и т. д
5. Можно продемонстрировать метод фиксации двух концов обломков кости при перевязке.
6. Доступны 4 вида повязок.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

Подготовка манекена к эксплуатации:

При эксплуатации тренажер должен быть защищен от ударов.

Избегайте использования фломастеров, чернильных ручек, ацетона, йода и других красящих веществ и предметов, не укладывайте тренажер на газетную бумагу или любые окрашенные поверхности. Материал симулятора имеет свойства впитывать красящие вещества.

Перевязки используются с целью защиты раны, уменьшения ее загрязнения, фиксации области или остановки кровотечения. Обычно используют бандаж и косыночную повязку. Независимо от метода перевязки, необходимо достигнуть прочной фиксации и умеренного сжимания тканей, помните, что операция должна проводиться с соблюдением правил асептики.