

**Методические рекомендации для преподавателей
по использованию манекена-тренажера ребенка 7
лет «МАЛЫШ-8» для обучения навыкам СЛР с
возможностью компьютерной регистрации
результатов и их распечатки (P2201SCPR)**



ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	
 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков	044/28-
Методические рекомендации для преподавателей	

Рассмотрено на заседании ЦПН
Протокол № 5 от 08 12 2020 г.
Руководитель ЦПН Абдраимова С.Е.

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	
 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков	044/28-
Методические рекомендации для преподавателей	

10	Flash-визитка с программой и каталогом	шт.	1
11	Персональная система управления (опционально)	компл.	1

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

Наименование: Манекен–тренажер ребенка 7 лет «МАЛЫШ-8» для обучения навыкам СЛР с возможностью компьютерной регистрации результатов и их распечатки (P2201S CPR).

Введение: Манекен–тренажер «МАЛЫШ-8» предназначен для отработки и оценки навыков сердечно-легочной реанимации, отработки навыков интубации трахеи. Модель строго соответствует рекомендациям Американской Ассоциации Сердца по СЛР и неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, а также требованиям по клиническому обучению. Основной особенностью данного тренажера является его автономность, удобство в процессе эксплуатации, высокое качество и надежность.

Комплектация:

№	Наименование	Ед.измерения	Количество
1	Тренажер	шт.	1
2	Кабель питания манекена	шт.	1
3	Костюм	шт.	1
4	Кабель для проводного соединения	шт.	1
5	Лицевой экран одноразовый (50шт.)	уп.	1

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	
 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков	044/28-
Методические рекомендации для преподавателей	

Характеристика:

1. Программное обеспечение для контроля процесса проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР);
2. Симуляция естественных воздушных путей ребенка;
3. Интубация трахеи;
4. Подвижная челюсть;
5. Искусственная вентиляция и компрессия грудной клетки, сходные с естественными;
6. Реалистичные ориентиры мест компрессии;
7. Контроль положения рук;
8. Автономная работа;
9. Проводное или Wi-Fi соединение с планшетом или ноутбуком;
10. Реакция зрачков на свет;
11. Пульс на сонной артерии автоматический;
12. Возможность распечатки результата;
13. Возможность регулировки настроек тренажера;
14. Внутримышечные инъекции в плечо и бедро (с наружной стороны);
15. Отработка навыков сестринского ухода.

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	
 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков	044/28-
Методические рекомендации для преподавателей	

Подготовка манекена к эксплуатации:

При эксплуатации тренажер должен быть защищен от ударов.

Избегайте использования фломастеров, чернильных ручек, ацетона, йода и других красящих веществ и предметов, не укладывайте тренажер на газетную бумагу или любые окрашенные поверхности. Для предотвращения возможного заражения студентов во время проведения практических занятий, рекомендуется использовать одноразовые лицевые маски при выполнении искусственного дыхания рот в рот.

1. Установите тренажер на ровную горизонтальную поверхность в положении лежа на спине.
2. Перед тем как приступить к полноценной работе рекомендуется зарядить тренажер полностью. Тренажер заряжается в течение 2-х часов.
3. Далее произвести состыковку с компьютером, можно произвести проводное или беспроводное соединение через Wi-Fi.
4. После запуска программного обеспечения манекена – тренажера, выберите режим работы: «экзамен» или «учебный» и нажмите «настройки»;
5. Установите объем лёгких от 300 до 500 мл.;
6. Установите глубину компрессионных сжатий от 3 до 4 см.;
7. Нажмите сохранить и приступайте к отработке навыков.