

Материал симулятора имеет свойства впитывать красящие вещества.

Завершение работы:

После окончания работы:

1. Необходимо протирать тренажер чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой;
2. Тщательно просушивать тренажер;
3. Собирать тренажер и его компоненты и хранить в сухом, проветриваем помещении.

Комплектация:

№	Наименование	Ед.измерения	Количество
1	Манекен младенца	шт.	1
2	Подгузник	шт.	1

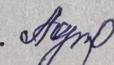
Методические рекомендации для преподавателей по использованию « Модель младенца, мальчик с подгузником» (Н40).



ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

Рассмотрено на заседании ЦПН

Протокол № 8 от 12 04 2022 г.

Руководитель ЦПН: Алимбеков М.Е. 

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

Наименование: «Модель младенца, мальчик с подгузником» (Р48).

Введение:

Манекен новорожденного мальчика в натуральную величину, идеально подходит для практики основных навыков ухода за новорожденными. Манекен можно одевать, раздевать, пеленать, менять подгузники.

Характеристика:

Размер манекена соответствует размером новорожденного ребенка. Манекен имеет подвижные суставы, глаза слегка приоткрыты. В комплект входит подгузник.

Подготовка тренажера к эксплуатации:

При эксплуатации тренажер должен быть защищен от ударов.

Избегайте использования фломастеров, чернильных ручек, ацетона, йода и других красящих веществ и предметов, не укладывайте тренажер на газетную бумагу или любые окрашенные поверхности.