

**Методические рекомендации для преподавателей
по использованию
тренажера для отработки навыков
внутримышечных инъекций в ягодицы с
электронным контроллером (P10B).**

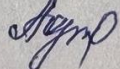


ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

Рассмотрено на заседании ЦПН

Протокол № 8 от 12 04 2022 г.

Руководитель ЦПН: Алимбеков М.Е. 

Комплектация:

№	Наименование	Ед.измерения	Количество
1	Тренажёр	шт.	1
2	Подставка	шт.	1
3	Симулятор йода	уп.	1
4	Шприц 5мл.	шт.	1
5	Батарейка тип «АА»	шт.	4
6	Мешок для жидкости	шт.	1
7	Кейс для транспортировки и хранения	шт.	1

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	
 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков	044/28-
Методические рекомендации для преподавателей	

Завершение работы

После окончания работы:

1. Протирайте тренажер чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой.
2. Тщательно просушить тренажер.
3. Собрать тренажер и его компоненты и храните в сухом, проветриваем помещении.

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	
 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков	044/28-
Методические рекомендации для преподавателей	

Наименование: Тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций в ягодичные мышцы с электронным контроллером (P10B).

Введение: Этот современный тренажер с правдоподобной кожей отлично подходит для отработки навыков внутримышечных инъекций в ягодичную мышцу и объяснения, как при этом избежать повреждения нервов и сосудов. Прозрачная правая сторона тренажера позволяет видеть внутреннюю структуру в этой области, включая кости, мышцы и нервы.

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

Характеристика:

1. Прозрачная правая сторона тренажера для демонстрации внутреннего строения: Кости, мышцы, нервы и вены, облегчает сравнение левой и правой стороны для профилактики повреждения нервов и вен.

2. Пальпация профилактики мест внутримышечных инъекций..

3. Встроенный контроллер издает звуковой сигнал и включает двухцветную индикацию при контроле положения иглы.

Чаще всего для внутримышечных инъекций выбирают верхнелатеральный квадрант ягодичной области. Старайтесь не повредить седалищный нерв.

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

Подготовка тренажера к эксплуатации:

1. Протереть дезинфицирующей жидкостью кожу обычным методом.

2. Метод креста: Образно нарисуйте две (воображаемые) линии на правой ягодичной области, которые разделят ее на четверти. Первая линия – горизонтальная линия от вершины ягодичной щели (между ягодицами); вторая – вертикальная линия от вершины подвздошного гребня. Сделайте инъекцию в верхний латеральный квадрант (четверти), старайтесь не повредить седалищный нерв.

3. Расположите тренажер на столе. Включите питание индикаторная лампочка указывает на исправную работу.

4. Зеленая лампочка указывает на правильную технику выполнения внутримышечной инъекции и выбор места инъекции; красная лампочка извещает студентов, что положение иглы неправильное; звуковой сигнал, зеленая и красная лампочки предупреждают студентов, если игла вошла слишком глубоко.

5. Если место инъекции и глубина введения иглы правильные, введите в мышцу раствор.

6. Дренажная трубка сливает жидкость в резервуар.