

**Методические рекомендации для преподавателей  
по использованию  
тренажера для отработки приема Геймлиха  
ГЕННАДИЙ (P10650).**

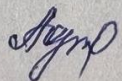


|                                                                                                                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ONTÜSTIK QAZAQSTAN<br>MEDISINA<br>AKADEMIASY<br>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ                                                                             |         |
|  SOUTH KAZAKHSTAN<br>MEDICAL<br>ACADEMY<br>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» |         |
| Центр практических навыков                                                                                                                                              | 044/28- |
| Методические рекомендации для преподавателей                                                                                                                            |         |

|                                                                                                                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ONTÜSTIK QAZAQSTAN<br>MEDISINA<br>AKADEMIASY<br>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ                                                                               |         |
|  SOUTH KAZAKHSTAN<br>MEDICAL<br>ACADEMY<br>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» |         |
| Центр практических навыков                                                                                                                                                | 044/28- |
| Методические рекомендации для преподавателей                                                                                                                              |         |

Рассмотрено на заседании ЦПН

Протокол № 8 от 12 04 2022 г.

Руководитель ЦПН: Алимбеков М.Е. 

|                                                                                             |  |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН<br>MEDISINA<br>AKADEMIASY<br>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ |  |  SOUTH KAZAKHSTAN<br>MEDICAL<br>ACADEMY<br>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» |
| Центр практических навыков                                                                  |  | 044/28-                                                                                                                                                                 |
| Методические рекомендации для преподавателей                                                |  |                                                                                                                                                                         |

### Комплектация:

| № | Наименование               | Ед.измерения | Количество |
|---|----------------------------|--------------|------------|
| 1 | Манекен<br>(мужской торс ) | шт.          | 1          |
| 2 | Инородное тело             | компл.       | 1          |

|                                                                                             |  |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН<br>MEDISINA<br>AKADEMIASY<br>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ |  |  SOUTH KAZAKHSTAN<br>MEDICAL<br>ACADEMY<br>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» |
| Центр практических навыков                                                                  |  | 044/28-                                                                                                                                                                   |
| Методические рекомендации для преподавателей                                                |  |                                                                                                                                                                           |

**Наименование:** Тренажер ГЕННАДИЙ для отработки приема Геймлиха(P1065).

### Введение

Манекен половины туловище взрослого человека для выполнения приема Геймлиха был разработан в качестве учебного пособия, в соответствии с требованиями системы образования и практики выполнения операций неотложной помощи, отвечает всем требованиям.

### Характеристика

Манекен выполнен из ПВХ, этоточная копия половины туловища человека. Он подходит для демонстрации и обучения студентов медицинских школ, колледж и других медицинских учреждений.

|                                                                                                                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ONTÜSTIK QAZAQSTAN<br>MEDISINA<br>AKADEMIASY<br>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ                                                                             |         |
|  SOUTH KAZAKHSTAN<br>MEDICAL<br>ACADEMY<br>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» |         |
| <b>Центр практических навыков</b>                                                                                                                                       | 044/28- |
| Методические рекомендации для преподавателей                                                                                                                            |         |

### **Подготовка тренажера к эксплуатации:**

При эксплуатации тренажер должен быть защищен от ударов.

Избегайте использования фломастеров, чернильных ручек, ацетона, йода и других красящих веществ и предметов, не укладывайте модели на газетную бумагу или любые окрашенные поверхности. Материал модели имеет свойства впитывать красящие вещества.

1.Поместите инородное тело в ротовую полость.

2Необходимо встать за спиной манекена, обхватив его руками.

3Сжать одну руку кулак и той стороной, где большой палец, положить ее на живот манекена на уровне между пупком и ребрными дугами.

4 Ладонь другой руки кладется поверх кулака,быстрым толчком вверх, кулак вдавливаются в живот. Руки при этом нужно резко согнуть в локтях, но грудную клетку пострадавшего не сдавливать.

|                                                                                                                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ONTÜSTIK QAZAQSTAN<br>MEDISINA<br>AKADEMIASY<br>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ                                                                               |         |
|  SOUTH KAZAKHSTAN<br>MEDICAL<br>ACADEMY<br>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» |         |
| <b>Центр практических навыков</b>                                                                                                                                         | 044/28- |
| Методические рекомендации для преподавателей                                                                                                                              |         |

5 При необходимости прием повторить несколько раз, пока дыхательные пути не освободятся.

### **Завершение работы:**

После окончания работы:

1. Выключить тренажер.
- 2.Необходимо протирать модели чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой;
- 3.Тщательно просушивать модели;
- 4.Хранить в сухом, проветриваем помещении.