

**Методические рекомендации для преподавателей по
использованию тренажера для отработки навыков
наложения повязок на верхнюю половину туловища (Р13)**



ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

Рассмотрено на заседании ЦПН
 Протокол № 22 от 18 10 2021 г.
 Руководитель ЦПН: Алимбеков М.Е. *Alimbekov*

3	Бандаж	шт.	1
4	Сумка для транспортировки и хранения	шт.	1

ONTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков	044/28-
Методические рекомендации для преподавателей	

1. Необходимо протереть манекен чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой;
2. Тщательно просушить тренажер;
3. Тренажер хранить в сухом, проветриваем помещении.

Комплектация:

ONTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков	044/28-
Методические рекомендации для преподавателей	

Название: Тренажер для отработки навыков наложения повязок на верхнюю половину туловища (P13).

Введение: Современный тренажер верхней конечности для отработки навыков наложения повязок имитирует пациента с двухсторонней ампутацией верхних конечностей. Правая рука ампутирована в нижней трети плеча. Используется для получения навыков по наложению повязок на культю ампутированной конечности. Кожа гладкая, мягкая, сухая и упругая, что позволяет закрепить лейкопластырь. Тренажер выполнен из ПВХ. Тренажер используется в высших и средних специальных учреждениях медицинского образования, а также врачами больниц для демонстрации и обучения персонала наложению повязок.

Характеристика:

1. Тренажер имитирует пациента с двусторонней ампутацией верхних конечностей;
2. Правая рука с ампутацией половины предплечья, а левая ампутирована до локтевого сустава; модель может использоваться для получения навыков по наложению повязок на культю ампутированной конечности;

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

3.Тренажер удобен для наложения повязки на брюшную стенку;

4. Может использоваться для наложения циркулярных, спиральных повязок; повязки в форме цифры восемь, а также для наложения повязки на грудную клетку, и т.д.;

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

Подготовка манекена к эксплуатации:

При эксплуатации тренажер должен быть защищен от ударов.

1. Установите тренажер на ровную горизонтальную поверхность.

2. Перевязки используется с целью защиты раны, уменьшения ее загрязнения, фиксации области или остановки кровотечения. Обычно используют биндаж и косыночную повязку. Независимо от метода перевязки, необходимо достигнуть прочной фиксации и умеренного сжимания тканей, помните, что операция должна проводиться с соблюдением правил асептики.