


**Методические рекомендации для преподавателей
по использованию надеваемые тренажер-
накладки для отработки навыков ухода за
пролежнями (LV2Y, 6 видов накладок)**

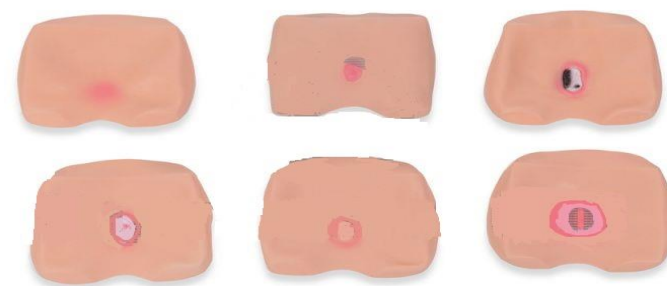


ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	
 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков	044/28-
Методические рекомендации для преподавателей	

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	
 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков	044/28-
Методические рекомендации для преподавателей	

Рассмотрено на заседании ЦПН

Протокол № 8 от 12 04 2022 г.

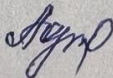Руководитель ЦПН: Алимбеков М.Е. 

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	
 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков	044/28-
Методические рекомендации для преподавателей	

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	
 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков	044/28-
Методические рекомендации для преподавателей	

Наименование: Надеваемые тренажер-накладки для отработки навыков ухода за пролежнями (LV2Y, 6 видов накладок)

Введение

Этот тренажер представляет собой пациента, который долго находится в постели, правдоподобен внешне и на ощупь, демонстрирует пролежни различной степени тяжести. Студенты могут изучать симптомы пролежней, разрыв мелких кровеносных сосудов, воспалительно-инфильтрационный период, период образования мелких язв и некротический период. На тренажере также можно проводить промывание ран, измерение длины и глубины и глубины ран. Для большей реалистичности тренажер оснащен ремнем, с помощью которого студенты могут его одевать.

ONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

Характеристика

1. Набор из шести накладок, имитирующих пролежни .
2. Возможность одевания тренажер студентами.
3. Деменстрация стадий и динамических изменений , включая разрыв мелких кровеносных сосудов, воспалительно-инфильтрационный период, период образования мелких язв и некротический период. .

ONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

Завершение работы

После окончания работы:

1. Протирать тренажер чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой.
2. Дать высохнуть.
3. Хранить в проветриваемом помещении.

Комплектация:

№	Наименование	Ед.измерения	Кол-во
1	Тренажер	шт.	1
2	Набор накладок (6шт)	Компл.	1