

**Методические рекомендации для преподавателей по  
использованию модель таза беременной со зрелым  
плодом, 4 части (ХС-332В).**



ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

Рассмотрено на заседании ЦПН

Протокол № 8 от 12 04 2022 г.

Руководитель ЦПН: Алимбеков М.Е. *М.Е. Алимбеков*

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

### Комплектация:

№	Наименование	Ед.измерения	Количество
1	Модель на подставке, 4 части	шт.	1

**Наименование:** Модель таза беременной со зрелым плодом, 4 части (ХС-332В).

**Введение:** Модель предназначена для использования как демонстрационный материал при обучении курса анатомии в общеобразовательных школах, средних и высших медицинских учебных заведениях.

### Характеристика:

Демонстрационная модель таза с плодом на девятом месяце беременности состоит из четырех частей. Срединный разрез женского таза с плодом на сроке беременности 40 недель. По этой модели можно изучать или показывать нормальное положение плода перед рождением, а также половую и выделительную систему. Представлены анатомические взаимоотношения между структурами таза матери и плода. Съёмный плод позволяет детально изучить его строение. На подставке также установлена матка с эмбрионом на 3-м месяце беременности для изображения дополнительных подробностей и сравнения.

Реалистичная высококачественная модель женского таза включает женские половые органы и другие важные анатомические структуры.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

### Подготовка моделей к эксплуатации:

При эксплуатации модели должен быть защищен от ударов.

Избегайте использования фломастеров, чернильных ручек, ацетона, йода и других красящих веществ и предметов, не укладывайте модели на газетную бумагу или любые окрашенные поверхности. Материал модели имеет свойства впитывать красящие вещества.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

### Завершение работы:

После окончания работы:

1. Необходимо протирать модели чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой;
2. Тщательно просушивать модели;
3. Хранить в сухом, проветриваем помещении.