


**Методические рекомендации для преподавателей
по использованию тренажер для отработки
навыков обследования глотки, с электронным
контроллером ВОЛЮДЯ-ЛОР РОТОГЛОТКА
(Р10063).**

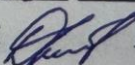

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	
 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков	044/28-
Методические рекомендации для преподавателей	

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	
 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков	044/28-
Методические рекомендации для преподавателей	

Рассмотрено на заседании ЦПН
Протокол № 4 от 13 12 2022 г.
Руководитель ЦПН:  Калменов Н.Д.

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

Комплектация:

№	Наименование	Ед.измерения	Количество
1	Тренижер	шт.	1
2	Контроллер	шт.	1
3	Кабель <контроллер - манекен>	шт.	1
4	Сетевой адаптер 12 V	шт.	1

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

Наименование: Тренажер для обследования глотки, с электронным контроллером.

Введение: Тренажер предназначен для применения в медицинских колледжах и ВУЗах, больницах и прочих учреждениях в качестве учебного пособия для отработки навыков обследования гортани. Модель имеет точное анатомическое строение. Кожа модели изготовлена из полимерного материала, создающего реалистичное ощущение. Изделие отличается качеством и надежностью.

Характеристика:

1. Тренажер имитирует верхнюю часть тела взрослого человека, с реалистичной ротовой полостью.

2. Мягкий язык, при осмотре может высовываться для облегчения обследования.

3. На надгортаннике просматривается злокачественное новообразование размером 2 см, можно использовать шпатель для отеснения языка, чтобы рассмотреть локализацию и свойства очага поражения.

4. Тренажер оснащен электронной сигнальной системой: при правильном выполнении операции

ONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	
 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков	044/28-
Методические рекомендации для преподавателей	

загораются соответствующие индикаторы и звучат голосовые подсказки.

Эксплуатация тренажера

1. Распакуйте тренажер и его компоненты, свертесь с упаковочным листом.
2. Установите тренажер на ровную горизонтальную поверхность.
3. Присоедините кабель к контроллеру (на задней панели) и манекену.
4. Подключите сетевой адаптор к контроллеру (на задней панели) и включите в сеть.
5. На задней панели контроллера нажмите кнопку «вкл./выкл.».
6. Прослушайте голосовые вступление и приступайте к процедуре.

Модель должен быть защищен от ударов.

Избегайте использования фломастеров, чернильных ручек, ацетона, йода и других красящих веществ и предметов, не укладывайте симулятора на газетную бумагу или любые окрашенные поверхности. Материал симулятора имеет свойства впитывать красящие вещества.

ONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	
 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков	044/28-
Методические рекомендации для преподавателей	

Завершение работы:

После окончания работы:

1. Выключить контроллер и отключить от сети.
2. Отсоединить кабель от манекена и контроллера.
3. Необходимо протирать модель чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой;
4. Тщательно просушивать;
5. Хранить в сухом, проветриваем помещении.