



9	Мешок для жидкости	шт.	2
10	Катетер урологический	шт.	1
11	Шприц 5 мл	шт.	1
12	Лицевой экран (50 шт.)	шт.	1
13	Зажим для трубок	шт.	3
14	Гель-смазка	уп.	1

**Методические рекомендации для преподавателей
по использованию тренажер ВОЛЮДЯ Перелом 2
для отработки навыков оказания первой помощи
при переломах (P1077)**

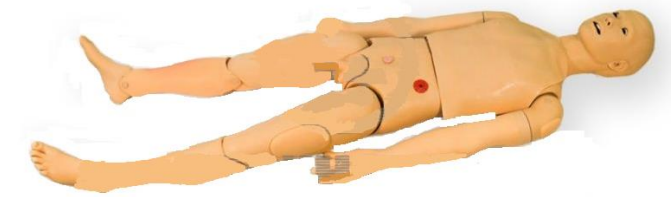

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

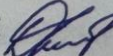Рассмотрено на заседании ЦПН
 Протокол № 4 от 13 12 2022 г.
 Руководитель ЦПН:  Калменов Н.Д.

Комплектация:

№	Наименование	Ед.изме рения	Количе ство
1	Манекен	шт.	1
2	Пижама	шт.	1
3	Сменный модуль женских половых органов	шт.	1
4	Желудочный зонд	шт.	1
5	Бандаж	шт.	1
6	Бинт	шт.	2
7	Хирургический пластырь	шт.	1
8	Трансфузионная система	шт.	1

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

Завершение работы:

После окончания работы:

1. Необходимо протирать модель чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой;
2. Тщательно просушивать;
3. Хранить в сухом, проветриваем помещении.

Наименование: Тренажер ВОЛОДЯ Перелом 2 оказания первой помощи при переломах .

Введение: Тренажер «ВОЛОДЯ-ПЕРЕЛОМ-2» предназначен для отработки навыков оказания первой помощи при переломах. Манекен выполнен с точными анатомическими ориентирами. Манекен подходит для демонстрации и обучения студентов медицинских школ, колледжей и других медицинских учреждений.

ONTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков	044/28-
Методические рекомендации для преподавателей	

ONTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков	044/28-
Методические рекомендации для преподавателей	

Характеристика:

1. Тренажер представляет собой манекен взрослого человека.
2. Суставы рук подвижны в плечах, суставы ног подвижны в коленях и тазовой части.
3. Манекен имеет внутренние органы такие, как легкие, сердце, печень и желудок.
4. Оказание помощи при закрытом переломе правой ноги.
5. Оказание помощи при закрытом переломе левой руки.
6. Проведение интубации.
7. Проведение сердечно-легочной реанимации.
8. Промывание желудка.
9. Катетеризация мужской и женской уретры.
10. Уход за стомами.
11. Имитация пульса на сонной артерии, с помощью резиновый груши.
12. Контрастные зрачки.
13. Внутривенные инъекции в правую руку.
14. Внутримышечные инъекции (в плечо, в бедро, в ягодицу).
15. Сестринский базовый уход.

Эксплуатация тренажера

Модель должен быть защищен от ударов.

Избегайте использования фломастеров, чернильных ручек, ацетона, йода и других красящих веществ и предметов, не укладывайте симулятора на газетную бумагу или любые окрашенные поверхности. Материал симулятора имеет свойства впитывать красящие вещества.