

Завершение работы.

После окончания работы рекомендуется:

1. Протереть кожу чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой.
2. Тщательно высушите тренажер.
3. Соберите тренажер и храните его в сухом проветриваемом помещении.

Комплектация:

№	Наименование	Ед.измерения	Кол-во
1	Модель головы (тренажер)	шт.	1
2	Шприц 50мл	шт.	1

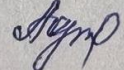
Методические рекомендации для преподавателей по использованию тренажера для отработки навыков промывания уха (LV40).



ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

Рассмотрено на заседании ЦПН

Протокол № 8 от 12 04 2022 г.

Руководитель ЦПН: Алимбеков М.Е. 

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

Наименование: тренажера для отработки навыков промывания уха (LV40).

Введение: Тренажер LV40 был разработан в качестве одного из средств обучения, в соответствии с потребностями учебной и клинической практики лечения заболеваний уха, отвечает требованиям клинического обучения. Тренажер представляет точную копию головы и наружного слухового прохода человека, позволяет выполнить промывание уха, практикислечения заболеваний уха. Тренажер подходит для учебной демонстрации и практических занятий студентов в медицинских школах, колледжах, высших медицинских учреждениях и клиниках.

Подготовка тренажера к эксплуатации:

Обучение технике промывания наружного слухового прохода (например: промывание при серных пробках) можно выполнить, соединив шприц с трубкой для промывания. Для этого необходимо соединить наружный конец трубки для промывания к шприцу с препаратом и соединить наружный конец пипетки устройства для отсасывания жидкости (не выходит в комплект).