


**Методические рекомендации для преподавателей
по использованию
тренажера СЕМА для отработки навыков
промывания желудка (Р10340).**

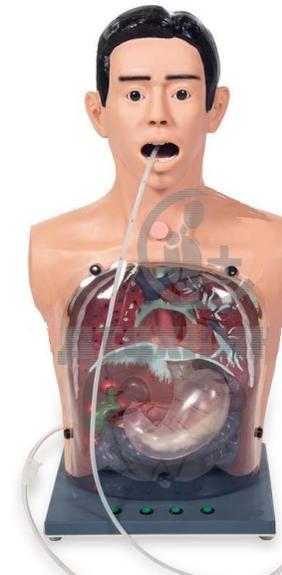

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

Рассмотрено на заседании ЦПН

Протокол № 8 от 12 04 2022 г.

Руководитель ЦПН: Алимбеков М.Е. *Алимбеков*

Комплектация:

№	Наименование	Ед.измерения	Количество
1	Торс человека с прозрачной грудной стенкой	шт.	1
2	Зонд желудочный	шт.	1
3	Гель-смазка	шт.	1
4	Зажим для трубок	шт.	1
5	Мешок для жидкости	шт.	1
6	Батарейки типа «АА»	шт.	2

ONTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков	044/28-
Методические рекомендации для преподавателей	

Демонстрация процедуры дренирования желчного пузыря, пузырного протока, печеночного протока, общего желчного протока и двенадцатиперстной кишки со световой системой контроля.

Завершение работы:

После завершения занятия:

1. После завершения учебной процедуры-кормления через носопищеводный зонд и промывания желудка-следует удалить оставшуюся жидкость из желудка и кишечника.
2. Извлечь батарейки.
3. Если изделие не используется в течение длительного времени, для продления срока службы его следует начисто протереть, упаковать и положить в сухое прохладное место.

ONTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков	044/28-
Методические рекомендации для преподавателей	

Наименование: Тренажер СЕМА для отработки навыков промывания желудка (P10340).

Введение: Манекен для отработки навыков промывания желудка представляет собой учебно-практическое пособие для отработки навыков медицинской помощи и обучения медицинского персонала. Изделие представляет собой манекен, изображающий верхнюю часть тела человека, передняя сторона которого выполнена из прозрачного пластика, что удобно при осуществлении клинических операций. Он может разбираться и собираться при помощи болтов, а расположение и морфологическую структур внутренних органов в грудной полости, брюшной полости и ротовой полости можно наблюдать невооруженным глазом. Данный манекен со световой системой может имитировать дренирование желчного пузыря и двенадцатиперстной кишки, постановку желудочного зонда и процедуру промывания желудка. Манекен выглядит реалистично и правдоподобно имитирует клиническую картину. Сопротивление, которое встречает трубка для промывания желудка при введении, подобно тому, которое наблюдается в настоящем человеческом теле. Манекен предназначен для практических занятий, процедур и обучения студентов и медицинского персонала в

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

медицинских колледжах, профессиональных медицинских училищах, медицинских ВУЗах и прочих медицинских учреждениях.

Характеристика

1. Уход за полостью рта
2. Кормление через носопищевой зонд
3. Промывание желудка: отработка навыков введения трупки для промывания желудка и процедуры промывания желудка
4. Лабораторные обследования: отработка навыков взятия желудочного содержимого и дуоденального зондирования, декомпрессии желудочно-тракта и раздувания желудочного и кишечного баллонов трехпросветной трупкой
5. Можно видеть невооруженным глазом ротовую полость, грудную полость, а также расположение и очертания внутренних органов, в том числе расположение и очертания небного язычка, бронхов, легких, желудка, двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря, пузырного протока, печеночного протока и общего желчного протока.
6. Возможновыполнение процедуры дренирования желчного пузыря пузырного протока, печеночного протока, общего желчного протока и двенадцатиперстной кишки со световой системой.

Подготовка тренажера к эксплуатации:

Процедура промывания желудка может проводиться как в сидячем, так и в лежачем и прочих положениях тела пациента.

Имитация процедуры промывания желудка может проводиться различными способами- такими, как промывание при помощи зонда (смазать желудочный зонд заранее приготовленным вазелиновым маслом, ввести зонд на 45-50см через ротили нос), промывание желудка при помощи электрического отсасывателя. Если процедура введение зонда для промываемя желудка выполнена верно,появится имитатор желудочного содержимого (т.к. имитатор желудочного содержимого не подлежит транспортировке, следет приготовить его самостоятельно). Следует наливать жидкость для промывания желудка объемом по 300-500мл, повторяя операцию. Вымываемая жидкость будет выливаться через выходное отверстие выводного протока. По окончании процедуры промывания желудка следует вылить оставшееся содержимое желудка через выводной проток. Возможна отработка навыков взятия желудочного сока и дуоденального зондирования, декомпрессии желудочно-кишечного тракта и раздувания желудочного и кишечного баллонов трехпросветной трупкой.