


**Методические рекомендации для преподавателей  
по использованию  
тренажера наложения повязок и швов (P18).**

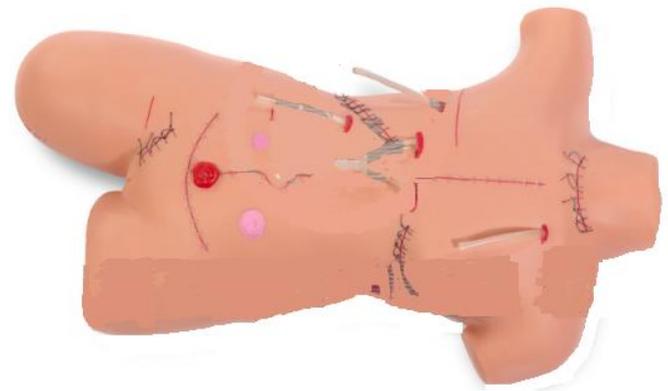

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

Рассмотрено на заседании ЦПН

Протокол № 8 от 12 04 2022 г.

Руководитель ЦПН: Алимбеков М.Е. *Алимбеков*

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

**Наименование:** Тренажер наложения повязок и швов.

**Введение:** Симулятор предназначается для выполнения наиболее распространенных хирургических разрезов, симулирующих все виды торакотомии и лапаротомии у женщин, постановку дренажных трубок и ампутационную культю. Студенты могут отрабатывать навыки лечения ран, включающего промывание, дезинфекцию, перевязку, наложение повязок и т. д. Кожа является мягкой и эластичной, тем самым обеспечивая надежную фиксацию повязок.

**Характеристика:**

1. Тиреоидэктомия
2. Рассечение грудины по средней линии
3. Правосторонняя мастэктомия
4. Правосторонняя холецистэктомия
5. Аппендэктомия
6. Левосторонняя колостомия
7. Правосторонняя колостомия
8. Абдоминальная гистерэктомия (поперечный разрез)

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

9. Левосторонняя нефрэктомия  
(торакоабдоминальный разрез)

10. Правосторонняя нефрэктомия (косой разрез)

11. Ламинэктомия

12. Пролежень на крестце- стадии 2

13. Ампутационная культя правого бедра

#### **Подготовка моделей к эксплуатации:**

При эксплуатации модели должен быть защищен от ударов.

Избегайте использования фломастеров, чернильных ручек, ацетона, йода и других красящих веществ и предметов, не укладывайте модели на газетную бумагу или любые окрашенные поверхности. Материал модели имеет свойства впитывать красящие вещества.

#### **Завершение работы:**

После окончания работы:

1.Необходимо протирать модели чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой;

2.Тщательно просушивать модели;

3.Хранить в сухом, проветриваем помещении.

#### **Комплектация:**

№	Наименование	Ед.изм ерения	Количество
1	Тренажер	шт.	1