


**Иық артроскопиясы дағдысын игеруге арналған  
«АРТОПЛЕЧ» тренажерін пайдалану бойынша  
әдістемелік нұсқаулық (P77)**



ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

ТДО отырысында талқыланды  
 Хаттама № 20 18.10 2021 ж.  
 ТДО басшысы: Алимбеков Алимбеков М.Е.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

### Жұмысты аяқтау:

Жұмысты аяқтағаннан кейін:

1. Тренажерді жылы сабынды суға малынған таза шүберекпен сүртіңіз;
2. Тренажерді жақсылап құрғатыңыз.

### Жабдық:

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	Тренажер	дана	1

**Атауы:** Иық артроскопиясы дағдысын игеруге арналған «АРТОПЛЕЧ» тренажер (Р77).

**Кіріспе:** «АРТРОПЛЕЧ» тренажері иық артроскопиясы дағдысын игеруге арналған. Тренажер оң жақ иық буыны, оның ішінде тері, бұлшықет тобы және сіңірлерден тұрады. Буынның құрылымы мен функцияларын зерттеуге ыңғайлы болу үшін тренажер жиналмалы болып табылады.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық	

### Сипаттама:

1. Тренажер стендте орналасқан адамның оң иығы болып табылады.

2. Құрылымын зерттеуге ыңғайлы болу үшін, тренажер екі бөліктен тұрады. Бір бөлігі стендтен бөлек алынады.

3. Иық буыны адамның анатомиялық құрылымына сәйкес жасалынған. Толығырақ зерттеу үшін тренажердан бекіткіш болт алынады.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық	

### Пайдалануға дайындау:

Тренажерді пайдалануға дайындау:

Жұмыс кезінде тренажер соққылардан қорғалуы керек.

1. Тренажерді тегіс жерге орналастыру қажет.

2. Бекіткіш болтты алып, екі бөлікке бөліп пайдалану керек.

