


Қуықты катетерлеу дағдыларын жаттықтыруға арналған «КАТ-ПРОФИ» тренажерін пайдалану бойынша оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқау

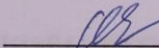


<p>QNTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Qntystik Qazaqstan medicina akademiasy» AQ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY AO «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық	

<p>QNTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Qntystik Qazaqstan medicina akademiasy» AQ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY AO «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық	

ТДО отырысында қарастырылды

Хаттама № 5 08 12 2020 ж.

ТДО басшысы  Абдраимова С.Е.

Жинақтау:

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	Тренажер	дана.	1
2	Контроллер	дана	1
3	Адаптер 12V	дана	1
4	Кабель «тренажер – контроллер»	дана	1
5	Ауыстырмалы әйел жыныс мүшесі	дана	1
6	Фолея катетеры	дана	1
7	Ректальды түтікше	дана	1
8	Жақпа-гелі	дана	1
9	Сұйықтыққа арналған қапшық	дана	1
10	Шприц 5 мл.	дана	1

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Жұмыстың аяқталуы:

Жұмысты аяқтағаннан кейін:

1. Тренажер қуатын өшіріңіз. Оны электр желісінен өшіріңіз.
2. Қалған сұйықтықты тренажерден алып тастау керек.
3. Тренажерды жылы сабынды суға малынған таза шүберекпен сүртіңіз.
4. Тренажер кептірілсін.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Атауы: «КАТ-ПРОФИ» қуықты катетерлеу дағдыларын жаттықтыруға арналған тренажер

Кіріспе: Клиникалардың медициналық қызметкерлерін зәр шығару каналын катетерлеуге және клизма жасау дағдыларын жаттықтыруға арналған заманауи тренажер. Тренажер адам денесінің нақты анатомиялық құрылымы негізінде жасалған. Жеңіл салмақ оңай қозғалуға және пайдалануға мүмкіндік береді. Тәжірибелік клиникалық дағдыларды алуға арналған.

Сипаттамасы:

1. Уретраны катетеризациялау.
2. Қуықты жуу.
3. Ерлер уретрасы 18-22 см, үш физиологиялық тарылу, екі иілімі, әйел уретрасы тік 3-5 см.
4. Шынайы ауыстыралатын (ер\әйел) жыныс мүшелері.
5. Орыс тілінде сенсорлық басқару және дауыстық шақырулармен процедуралардың дұрыстығын бағалау үшін орыс тіліндегі электрондық контроллер.
6. Бұлшық ет ішіне инъекция.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

7. Стомаға күтім жасау.

8. Клизма жасау.

Манекенді пайдалануға дайындау:

Пайдалану кезінде тренажер соққылардан қорғалуы керек.

Жаттықтырушымен тек қатты, таза жерде жұмыс жасаңыз. Фломастер, сия қаламдарын, ацетонды, йодты және басқа да бояғыш заттарды пайдаланбаңыз, жаттықтырушыны газет бетіне немесе боялған беттерге қоймаңыз.

1. Тренажерді тегіс, көлденең бетке орнатыңыз.
2. Катетеризация сабағын бастамас бұрын, қуықты таза сумен толтырыңыз. Мұны істеу үшін сұйықтықты (суды) қапшыққа салыңыз, төменгі түтікті қысқышпен (жиынтықта) басып, сұйықтық салынған қапшықты тренажердан шамамен 40-45 см жоғары қойыңыз. Түтіктің ұшын тренажердің ішкі қабырғасындағы орталық тесікке жалғаңыз және қысқышты босатыңыз.
3. Клизма жасамас бұрын ішектерді таза сумен толтырыңыз. Мұны істеу үшін іштің қабырғасын жаттықтырушыдан алыңыз, ішекке ұқсас контейнерді бұрап, оны сұйықтықпен (сумен) толтырыңыз.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

4. Контроллерді тренажерге кабель арқылы қосыңыз және оны бекітіңіз (тренажердің оң жағында және контроллердің артқы жағында қосылатын ұяшық).

5. Контроллердің қуатын 12V адаптерімен қосыңыз, контроллерді қосыңыз, дауысты сәлемдесу орындалады. Тренажер жұмысқа дайын.