


**Тізе буынының артроскопиясын жүргізуге
арналған "АРТРОСКОЛ" тренажерін пайдалану
бойынша оқытушыларға арналған әдістемелік
нұсқаулық (Р75)**



ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

ТДО отырысында талқыланды
 Хаттама № 20 18.10 2021 ж.
 ТДО басшысы: Алимов Алимбеков М.Е.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Жабдықтар:

№	Атауы	Өлшем бірлігі	саны
1	Тренажер	дана	1

Атауы: Тізе буынының артроскопиясын жүргізуге арналған "АРТРОСКОЛ" тренажері (P75).

Кіріспе: "АРТРОСКОЛ" тренажері тізе буынының артроскопиясын жүргізу тәжірбиелік дағдыларына арналған. Тренажер-бұл тізе буыны, оның ішінде тері, бұлшық еттер мен сіңірлер тобы. Буынның құрылымы мен функцияларын зерттеуге ыңғайлы болу үшін жиналмалы тренажер.

Сипаттамасы:

- 1.Тренажер адамның тізе буынын білдіреді.
- 2.Құрылымды ыңғайлы зерттеу үшін тренажер бөліктерге бөлінеді.
- 3.Тізе буыны адамның анатомиялық құрылымына сәйкес жасалады.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Пайдалануға дайындау

1. Жұмыс кезінде тренажер соққылардан қорғалуы керек.
2. Тренажерды тегіс жерге орналастыру қажет.
3. Бұрамаларын ашып, анатомиялық құрылымын көру үшін екі бөлікке бөлу керек.



ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Жұмысты аяқтау:

Жұмысты аяқтағаннан кейін:

1. Тренажерді жылы сабынды суға малынған таза шүберекпен сүртіңіз.
2. Кептіруге уақыт беру.
3. Желдетілетін бөлмеде сақталады.