



**Аяққа хирургиялық тігістерді салуға арналған
тренажерды пайдалану бойынша оқытушыларға
арналған әдістемелік нұсқаулық (LV2Y)**

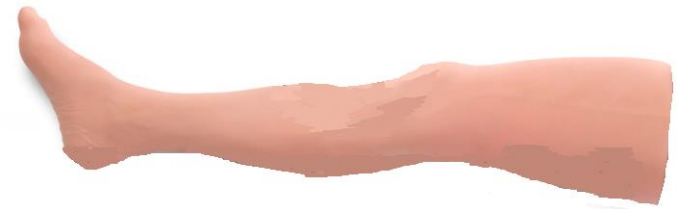

| | | |
|---|---------|---|
| ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ | |  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» |
| Тәжірибелік дағдылар орталығы | 044/28- | |
| Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық | | |

| | | |
|---|---------|---|
| ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ | |  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» |
| Тәжірибелік дағдылар орталығы | 044/28- | |
| Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық | | |

ТДО отырысында талқыланды
 Хаттама № 20 18.10 2021 ж.
 ТДО басшысы: Алимбаев Алимбеков М.Е.

| | | | |
|---|--|---|--|
| ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ | |  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» | |
| Тәжірибелік дағдылар орталығы | | 044/28- | |
| Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ | |  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» | |
| Тәжірибелік дағдылар орталығы | | 044/28- | |
| Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық | | | |

Жұмысты аяқтау:

Жұмысты аяқтағаннан кейін:

1. Тренажерді жылы сабынды суға малынған таза шүберекпен сүртіңіз.
2. Тренажердын кепкенін күтеміз.
3. Желдетілетін бөлме жағдайында сақталады.

Жабдық:

| № | Атауы | Өлшем бірлігі | Саны |
|----|---|---------------|------|
| 1. | Аяққа хирургиялық тігістер салуға арналған Тренажер | дана | 1 |

Атауы: LV2Y аяққа хирургиялық тігістерді салуға арналған Тренажер

Кіріспе: тренажерды немесе оның компоненттерін тазартқыш сұйықтықтарға батырмаңыз. Тренажермен тек таза жерде жұмыс жасаңыз. Киізден жасалған қаламдарды, сия қаламдарын, ацетонды, йодты және басқа да бояғыш заттар мен заттарды пайдаланбаңыз, жаттықтырушыны газет бетіне немесе бояғыш беттерге қоймаңыз. Тренажер материалы бояғыш заттарды сіңіру қасиеттеріне ие. Ұзақ мерзімді пайдалануды қамтамасыз ету үшін тренажерді әрбір оқу емтиханынан кейін тазалау керек. Тренажерды желдетілетін жерде сақтаңыз, тікелей күн сәулесінен және ылғалдылығы жоғары жерлерден аулақ болыңыз. Тренажерды жылыту құрылғыларынан алыс ұстаңыз.

| | | |
|---|---------|---|
| ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ | |  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» |
| Тәжірибелік дағдылар орталығы | 044/28- | |
| Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық | | |

Сипаттамасы:

Модель жұмсақ термопластикалық материалдан жасалған, бұл студенттерге хирургиялық дағдыларды дамытуға немесе мұғалімнің тігісті қалай қою керектігін көрсетуге арналған жаттығу құралы. Жұмсақ және серпімді тері жүздеген тігіс операцияларына төтеп береді.

| | | |
|---|---------|---|
| ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ | |  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» |
| Тәжірибелік дағдылар орталығы | 044/28- | |
| Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық | | |

Пайдалануға дайындау:

Трәнежерді пайдалануға дайындау:

Жұмыс кезінде тренажер соққылардан қорғалуы керек.

1. Тренажерді тегіс жерге орналастыру керек.
2. Дағдыны алдан ала дайындалған материалдардармен (ине, жіп) бастау керек.