


**(P4212CPR) Нәтижелерді тіркеу және оларды
басып шығару мүмкіндігі бар, ЖӨР дағдыларын
үйретуге арналған ВОЛЮДЯ тренажерін
пайдалану бойынша оқытушыларға арналған
әдістемелік нұсқаулық**

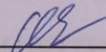


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ТДО отырысында қарастырылды

Хаттама № 5 08 12 2020 ж.

ТДО басшысы  Абдраимова С.Е.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Атауы: Нәтижелерді тіркеу және оларды басып шығару мүмкіндігі бар жүрек-өкпе реанимация дағдыларын үйретуге арналған (P4212CPR) ВОЛОДЯ манекен-тренажері

Кіріспе: "ВОЛОДЯ" Манекен–тренажері жүрек-өкпе реанимациясының дағдыларын пысықтауға және бағалауға арналған. Осы манекен-тренажердің негізгі артықшылықтары пайдалану үдерісіндегі ыңғайлылық, жоғары сапа және сенімділік болып табылады.

Жұмысты аяқтау:

Жұмысты аяқтағаннан кейін :

1. Бағдарламаны жабыңыз.
2. Қуат түймесін өшіріңіз.
3. Тренажерді жылы сабынды суға малынған таза шүберекпен сүртіңіз.
4. Тренажерді мұқият құрғатыңыз.


Жинақ:

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	Тренажер	дана	1
2	Манекеннің қуат кабелі	дана	1
3	Кедалар	дана	1
4	Костюм	дана	1
5	Сыммен байланысуға арналған кабель	дана	1
6	Бір реттік бет экраны (50дн.)	орам	1
7	Өкпе қап	дана	2
8	Эндотрахеальды түтікше	дана	1

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
			
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Сипаттамасы:

1. Жүрек-өкпе реанимациясын (ЖӨР) жүргізу процесін бақылауға арналған бағдарламалық қамтама);
2. Симуляция табиғи әуе жолдарының ересек адам;
3. Кеңірдек интубациясы;
4. Жылжымалы жақ;
5. Табиғи жасушаларға ұқсас жасанды желдету және кеуде қуысының қысылуы;
6. Сығымдау орындарының нақты белгілері;
7. Қолдың қалпын бақылау;
8. Автономды жұмыс;
9. Планшетпен немесе ноутбукпен сымды немесе Wi-Fi байланысы;
10. Оқушылардың жарыққа реакциясы;
11. Каротид артериясындағы автоматты пульсі;
12. Нәтижені басып шығару мүмкіндігі;
13. Тренажер параметрлерін реттеу мүмкіндігі;
14. Дефибрилятормен нақты дефибрилляция мүмкіндігі.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
			
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Манекенді пайдалануға дайындау:

Пайдалану кезінде тренажер соққылардан қорғалуы керек.

Фломастерды, сия қаламдарын, ацетонды, йодты және басқа да бояғыш заттар мен заттарды пайдаланбаңыз, жаттықтырушыны газет бетіне немесе боялған беттерге қоймаңыз. Тәжірибелік сабақтар кезінде студенттердің ықтимал инфекциясының алдын алу үшін ауыздан ауызға жасанды тыныс алу кезінде бір реттік бет маскаларын қолдану ұсынылады.

1. Тренажерді арқасын тегіс, көлденең бетке орнатыңыз.
2. Толық жұмысқа кіріспес бұрын тренажерді толығымен зарядтауға кеңес береміз. Тренажер 2 сағат ішінде зарядталады.
3. Әрі қарай, компьютермен байланыс орнатыңыз, Wi-Fi арқылы сымды немесе сымсыз байланыс жасай аласыз.
4. Манекен-тренажердің бағдарламалық жасақтамасын іске қосқаннан кейін компьютердің жұмыс үстелінде оң жақта "емтихан режимі" (A1) мен "оқу режимі" (A2) арасында таңдау жасауға болатын CPR бөлімінің терезесі пайда болады.