


**Бала туудың демонстрациялық моделін
қолдану бойынша оқытушыларға арналған
әдістемелік нұсқаулық (А42007).**

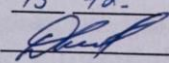

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ТДО отырысында қарастырылды
 Хаттама № 4 13 12 2022 ж.
 ТДО басшысы  Калменов Н.Д.

Жабдық:

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	Туу моделі (I), стендте,4 бөлік	дана	1
2	Туу моделі (II), стендте,3 бөлік	дана	1
3	Туу моделі (III), стендте,4 бөлік	дана	1

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық	

Фломастер, сия қаламдары, ацетон, йод және басқа бояғыштар мен заттарды пайдаланбаңыз, құрылғыны газет қағазына немесе кез келген боялған беттерге қоймаңыз. Тренажер материалы бояғыштарды сіңіретін қасиеттерге ие.

Жұмысты аяқтау.

1. Тренажерды сабынды жылы суға малынған таза шүберекпен сүрту қажет;
2. Тренажерды мұқият құрғатыңыз;
3. Тренажерды құрғақ және желдетілетін бөлмеде сақтаңыз.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық	

Кіріспе: Модель босанудың әртүрлі кезеңдерінің үш бөлек моделі болып табылады, әр модельге 3 бөлік кіреді: жамбас, жатыр және ұрық. Әрбір туу үлгісі стендке бекітілген; ПВХ және бояудан жасалған.

Модельдерде босану кезеңдері ұсынылған, нәресте басының ернуінен өтуі көрсетілген.

I.-Жатырдағы ұрық, жатыр ернеуі ашық

II. - Жатырдағы ұрық, шығу басталады

III. - баланың тууы, жатырдағы плацента

Модель жалпы білім беретін мектептерде, орта және жоғары медициналық оқу орындарында анатомия курсына оқытуда демонстрациялық материал ретінде пайдалануға арналған.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық	

Сипаттамасы: Босану моделі 44 позицияны көрсетеді:

1. Мықын сүйегі
2. Жоғарғы мықын сүйегі
3. Ұршық ойығы
4. Жамбас сүйегінің тармағы
5. Қасаға симфизі
6. Сегізкөз сүйегінің тармағы
7. Шонданай бұдыры
8. Үшінші бел омыртқасы
9. Жапқыш жарғағы
10. Сыртқы жапқыш бұлшық еті
11. Ішкі жапқыш бұлшық еті
12. Сегізкөз қырлы байламы
13. Сегізкөз бұдыр байламы
14. Анусты көтеретін бұлшық ет
15. Құйымшақ бұлшықеті
16. Аралық беткейлік көлденең бұлшық еті
17. Аралық терең көлденең бұлшықеті
18. Буылтықты кемікті бұлшық ет
19. Шонданайлы кемікті бұлшық ет
20. Анус және сыртқы анус сфинктері
21. Жатыр түбі
22. Жатыр денесі
23. Жатыр мойны

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық	

24. Физиологиялық шекаралық (контракциялық) сақина

25. Жатыр мойнының жоғалып кеткен арнасы
26. Қынап
27. Ішастар
28. Жатырдың бұлшық ет қабығы
29. Спиральды жатыр артериялары
30. Жатыр венасы
31. Плацентаның децидуальды қабығы
32. Жатырдың дөңгелек байламы
33. Жатыр түтігі
34. Аналық без
35. Сигма тәрізді тоқ ішек
36. Клитор
37. Уретраның сыртқы саңылауы
38. Кіші жыныс мүшесінің ерні
39. Кіреберіс үлкен безі
40. Бала жолдасы
41. Амнион
42. Кіндік канатигі
43. Кіндік артериясы
44. Кіндік көк тамыры

Жұмыс кезінде модель соққылардан қорғалуы керек.

Жұмыс кезінде тренажер соққылардан қорғалуы керек.