

### Жұмысты аяқтау.

Жұмысты аяқтағаннан кейін ұсынылады:

1. Теріні жылы сабынды суға малынған таза шүберекпен сүртіңіз.
2. Тренажер мұқият құрғатыңыз.
3. Тренажер жинап, оны құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.


### Жабдық:

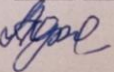
№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	Бас моделі (тренажер)	дана	1
2	Шприц 50мл	дана.	1

**Құлақты жуу дағдыларын дамытуға арналған тренажерді пайдалану бойынша оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық (LV40).**



ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ТДО отырысында қаралды  
 Хаттама № 8 12 04. 2022 ж.  
 ТДО басшысы:  Алимбеков М.Е.

**Атауы:** Құлақты жуу дағдыларын дамытуға арналған тренажер (LV40).

**Кіріспе:** LV40 тренажері оқу құралдарының бірі ретінде, құлақ ауруларын емдеудің оқу және клиникалық практикасының қажеттіліктеріне сәйкес әзірленген, клиникалық оқыту талаптарына жауап береді.

**Сипаттамасы:**

Тренажер адамның басы мен сыртқы есту жолының дәл көшірмесін ұсынады, құлақты жууға, құлақ ауруларын емдеуге мүмкіндік береді. Тренажер, жоғары медициналық мекемелер мен клиникаларда студенттердің оқу демонстрациясы мен практикалық сабақтарына арналған.

**Манекенді пайдалануға дайындау:**

Сыртқы құлақ каналын жуу техникасын үйрету (мысалы: күкірт штепсельдерімен жуу) шприцті жууға арналған түтікке қосу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Ол үшін препараты бар шприцке жууға арналған түтіктің сыртқы ұшын жалғау және сұйықтықты соруға арналған құрылғы (пипетка) тамшуырының сыртқы ұшын жалғау қажет (жиынтыққа шықпайды).