


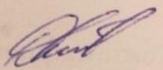
**Тіс кариесінің моделін дағдыларын
жаттықтыруға арналған моделін қолдану
бойынша оқытушыларға арналған нұсқаулық
(PO543)**



ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		28/07-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		28/07-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ТДО отырысында қаралды
 Хаттама № 4 10 12 2024 ж.

ТДО басшысы: Калменов Н.Д. 

Жабдық:

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	Модель 7 бөлік	дана.	1

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	28/07-
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық	

Жұмысты аяқтау:

Модельдермен жұмыс аяқталғаннан кейін ұсынылады:

1. Қаптаманы жылы, сабынды суға малынған таза шүберекпен сүртіңіз.
2. Құрғатыңыз.
3. Модельді және оның барлық компоненттерін жинаңыз.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	28/07-
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық	

Атауы: Тіс кариесінің моделі (PO543).

Кіріспе:

Кариестің демонстрациялық моделі, 7 бөлік, үш жиналмалы тістен және тіс тәрізді стендтен тұрады, кариес кезеңдерін және целлюлозаның зақымдалуын көрсетеді.

Сипаттамасы:

Модель ПВХ мен бояудан жасалған шамамен бір есе үлкейтілген.

Модельде тіс тіндері (эмаль, дентин және целлюлоза) және тістің проксимальды бетінде және жарықтар мен табиғи депрессиялар аймағында кариозды зақымданудың үш кезеңі көрсетілген.



ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		28/07-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

A. I кезең - беткі кариес (тіс эмальының кариесі)

B. II кезең-орташа кариес (дентин кариесі)

C. I кезең - терең кариес (кариес тін жетті, жүйке мен қан тамырларының зақымдануы, некротикалық тіндер)

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Тіс | 5. Тін |
| 2. Қызыл иек | 6. Кариозды қуыс |
| 3. Эмаль | 7. Қабынған тін |
| 4. Дентин өлген тіндер | 8. Кариозды қуыстар, |

Модель жоғары медициналық оқу орындарында оқуда демонстрациялық материал ретінде пайдалануға, сондай-ақ пациенттерге дәрігерлік қызмет көрсетуде көрсетуге арналған.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		28/07-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Тренажерді пайдалануға дайындау:

Жұмыс кезінде тренажер соққылардан қорғалуы керек.

Киізден жасалған қаламдарды, сия қаламдарын, ацетонды, йодты және басқа бояғыш заттар мен заттарды пайдаланбаңыз, модельды газет қағазына немесе боялған беттерге қоймаңыз.