

Ойық жараға күтім жасауды жаттықтыруға арналған ауыспалы, киілетін тренажерды пайдалану бойынша оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық (LV2Y, төсемдердің 6 түрі)

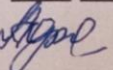


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ТДО отырысында қаралды

Хаттама № 8 / 12 / 04. 2022 ж.

ТДО басшысы:  Алимбеков М.Е.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Жабдық:

№	Атауы	Ед.өлшеу	Саны
1	Тренажер	дана	1
2	Жапсырмалар жинағы (6 дана)	Жинақ	1

Атауы: Ойық жараға күтім жасауды жаттықтыруға арналған ауыспалы, киілетін тренажер (LV2Y, төсемдердің 6 түрі)

Кіріспе

Бұл тренажер ұзақ уақыт бойы төсекте жатқан, сыртқы және жанасуға сенімді, әртүрлі ауырлықтағы қысымның жараларын көрсететін науқасты білдіреді. Студенттер қысымның жарасының белгілерін, ұсақ қан тамырларының жыртылуын, қабыну-инфльтрация кезеңін, ұсақ жаралардың пайда болу кезеңін және некротикалық кезеңді біле алады. Тренажерде жараларды жууға, жаралардың ұзындығы мен тереңдігін және тереңдігін өлшеуге болады. Үлкен реализм үшін тренажер белдікпен жабдықталған, оның көмегімен студенттер оны кие алады.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

Сипаттамасы

1. Қысым тақталарын еліктейтін алты төсем жиынтығы .
2. Студенттердің тренажерды кию мүмкіндігі.
3. Ұсақ қан тамырларының жарылуын , қабыну-инфильтрация кезеңін, ұсақ жаралардың пайда болу кезеңін және некротикалық кезеңді қоса алғанда, сатылар мен динамикалық өзгерістерді көрсету. .

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

Манекенді пайдалануға дайындау:

Жұмыс кезінде симулятор соққылардан қорғалуы керек.

Фломастер, сия қаламдары, ацетон, йод және басқа бояғыштар мен заттарды пайдаланбаңыз, симуляторды газет қағазына немесе кез келген боялған бетке қоймаңыз. Тренажер материалы бояғыштарды сіңіру мүмкіндігіне ие.

Жұмысты аяқтау.

Жұмысты аяқтағаннан кейін:

- 1.Тренажерды өшіру.
2. Тренажерді сабынды жылы суға малынған таза шүберекпен сүрту қажет;
3. Тренажерді мұқият құрғатыңыз;
4. Тренажерды құрғақ және желдетілетін бөлмеде сақтаңыз.