
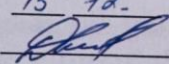


**Электронды контроллері бар жұтқыншақты  
тексеру  
ВОЛОДЯ-ЛОР АУЫЗЖҰТҚЫНШАҚ  
тренажерында тәжірибелік дағдыларын  
жаттықтыру үшін оқытушыларға  
арналған әдістемелік нұсқаулық (Р10063).**



ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ТДО отырысында қарастырылды  
 Хаттама № 4 13 1д. 2022 ж.  
 ТДО басшысы  Калменов Н.Д.

### Жабдық:

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	Манекен (әйел торсы)	дана	1
2	Жатыр модульдерінің жинағы	жинақ	1
3	Гель- жағындысы	дана	1

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

### Жұмысты аяқтау.

1. Тренажерды сабынды жылы суға малынған таза шүберекпен сүрту қажет;
2. Тренажерды мұқият құрғатыңыз;
3. Тренажерды құрғақ және желдетілетін бөлмеде сақтаңыз.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

**Атауы:** Электронды контроллері бар жұтқыншақты тексеру ВОЛОДЯ-ЛОР АУЫЗЖҰТҚЫНШАҚ тренажеры.

**Кіріспе:** Тренажер медициналық колледждер мен жоғары оқу орындарында, ауруханаларда және басқа мекемелерде көмейді тексеру дағдыларын пысықтауға арналған оқу құралы ретінде қолдануға арналған. Модельдің нақты анатомиялық құрылымы бар. Модельдің терісі шынайы сезім тудыратын Полимерлі материалдан жасалған. Өнім сапасы мен сенімділігімен ерекшеленеді.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

### Сипаттамасы:

1. Тренажер ересек адамның денесінің жоғарғы бөлігі, нақты ауыз қуысы бар.
2. Тексеруді жеңілдету үшін тексеру кезінде жұмсақ тіл шығуы мүмкін.
3. Тілшік беткейінде өлшемі 2 см қатерлі ісік көрінеді, шпательмен тілді итеріп, зақымданудың орналасуы мен қасиеттерін қарастырамыз.
4. Тренажер электронды сигнал беру жүйесімен жабдықталған: дағды дұрыс орындалған кезде тиісті индикаторлар жанады және дауыстық шақырулар естіледі.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

### Тренажерды жұмысқа дайындау:

1. Тренажерды және оның компоненттерін ашыңыз, орау парағымен тексеріңіз.
2. Тренажерді тегіс, көлденең бетке қойыңыз.
3. Кабельді контроллерге (артқы жағында) және манекенге бекітіңіз.
4. Желілік адаптерді контроллерге қосыңыз (артқы жағында) және желіге қосыңыз.
5. Контроллердің артқы жағындағы "қосу" түймесін басыңыз./ өшіру.».
6. Дауыстық кіріспені тындап, процедураны бастаңыз.

Жұмыс кезінде тренажер соққылардан қорғалуы керек.

Фломастер, сия қаламдары, ацетон, йод және басқа бояғыштар мен заттарды пайдаланбаңыз, құрылғыны газет қағазына немесе кез келген боялған беттерге қоймаңыз. Тренажер материалы бояғыштарды сіңіретін қасиеттерге ие.