

**(P1061) Көктамыршілік, бұлшықетшілік
инъекцияларға арналған "ИНМЭН-3" қол
тренажерін пайдалану бойынша оқытушыларға
арналған әдістемелік нұсқау**



Шымкент 2020

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			


ТДО отырысында қарастырылды
 Хаттама № 5 08 12 2020 ж.
 ТДО басшысы AB Абдраимова С.Е.

1	Қол моделі	дана	1
2	Сұйықтыққа арналған қапшық	дана	2
3	Түтікке арналған қысқыш	дана	2
4	Шприц 5 мл.	дана	1
5	Жгут	дана	1
6	Транфузиялық жүйе	дана	1

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казакстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

3. Тренажерді жылы сабынды суға малынған таза шүберекпен сүртіңіз.

4. Кептіруге қоямыз.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казакстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Атауы: Көктамыршілік, бұлшықетішілік инъекцияларға арналған "ИНМЭН-3" қол тренажері.

Кіріспе: «ИНМЭН–3» тренажері көктамыршілік инъекциялар мен пункцияларға, бұлшықетішілік инъекцияларға арналған. Ол жоғары сапалы материалмен, жетілдірілген пішінмен және нақты манипуляциялармен сипатталады. Сапалы өндіріс тиісті күтіммен, қауіпсіздік шараларымен және пайдалану ерекшеліктерімен көптеген жаттығу сессияларын қамтамасыз етеді.

Сипаттамасы:

1. Бұл тренажер - ересек адамның оң қолының моделі, сыртқы келбеті шынайы.
2. Көктамыр ішіне инъекциялар, пункциялар, қан құю және мейірбике күтімінің басқа процедураларын орындауға арналған.
3. Дұрыс пункциямен қанның кері ағымы, айқын сәтсіздік сезімі.
4. Жоғары полимерлі материалдан жасалған, жүзге дейін қайталанатын пункция жасауға мүмкіндік береді.
5. Тері мен қан тамырлары ауыстырылады.

Жинақ:

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
---	-------	---------------	------

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Жұмысқа дайындық:

Пайдалану кезінде тренажер соққылардан қорғалуы керек.

Фломастерді, сия қаламдарын, ацетонды, йодты және басқа да бояғыш заттар мен заттарды пайдаланбаңыз, жаттықтырушыны газет бетіне немесе боялған беттерге қоймаңыз.

1. Қан симуляторын дайындаңыз. Мұны жасау үшін су мен қан симуляторын 20:1 қатынасында араластырыңыз.

2. Қолдың қан тамырларын толтырыңыз. Қан тренажерын екі қаптың біріне, мысалы, А қан қапшығына құйыңыз (қан түтігіндегі қысқыш жабылуы керек).

3. Қан тренажерімен толтырылған А сөмкешесін 45 см биіктікте іліп қойыңыз. Модельден А сөмкешесінің түтігінің ұшын қол моделінің мөлдір түтіктерінің біріне жалғаңыз.

4. Қол моделінің шығатын түтігін бос қан дорбасына, мысалы, В дорбасына қосыңыз (қан дорбасы модельмен бірдей деңгейде немесе одан төмен болуы керек). А қан қапшығындағы қысқышты ашыңыз, ал қан тренажері

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

қолдың веноздық жүйесін баяу толтырады. Егер қан тренажері шығатын түтіктен құйыла бастаса, онда веноздық жүйе толығымен толтырылды десек болады. Осы кезде сөмкешенің қысқышын жауып, қол моделінің мөлдір түтігінде иілістер мен түйіндер бар-жоғын тексеріңіз. Назар аударыңыз: қан сөмкешесінің үштен екісі толған кезде, А және В сөмкешелерін ауыстырыңыз; процедураны бірнеше рет жасауға болады.