


Р1013 Тирокрикоцентез, крикотиротомия және трахеостомия дағдыларын жаттықтыруға арналған тренажерін пайдалану бойынша оқытушыларға әдістемелік нұсқау.

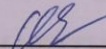


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казакстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казакстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ТДО отырысында қарастырылды

Хаттама № 5 08 12 2020 ж.

ТДО басшысы  Абдраимова С.Е.

Жинақ:

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	Тренажер	шт.	1
2	Кеңірдек шеміршегінің ауыстырылатын модулі	шт.	5
3	Мойын терісінің ауыстырылатын модулі	шт.	5

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық	

Жұмыстың аяқталуы:

Жұмысты аяқтағаннан кейін:

1. Тренажерді жылы сабынды суға малынған таза шүберекпен сүрту керек.
2. Тренажерді мұқият құрғатыңыз.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық	

Атауы: Тирокрикоцентез, крикотиротомия және трахеостомия дағдыларын жаттықтыруға арналған тренажер.

Кіріспе: Ересек адамның басы мен мойнын имитациялайтын бұл тренажер медициналық жоғары оқу орындарында, колледждерде, клиникаларда тирокрикоцентез және крикотиреотомия дағдыларын пысықтау және бағалау үшін арнайы жобаланған. Модель жұмсақ, серпімді және пункция кезінде шынайы сезім тудырады. Кенірдектің терісі мен сіңірі ауыстырмалы. Өнім сапасы мен сенімділігімен ерекшеленеді.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Сипаттамасы:

1. Тренажер ересек адамның басы мен мойнына ұқсайды, дәл анатомиялық құрылымымен ерекшеленеді.
2. Мойын терісі мен бұлшықеттері ерекшеленеді.
3. Дененің бетіндегі айқын анатомиялық белгілер арқылы сіз сақина тәрізді шеміршек пен трахея сақиналарын сезіне аласыз.
4. Пункцияны орындау үшін ыңғайлы, артқы жағында орналасқан позиция.
5. Әрбір ауыстырылатын элементті бірнеше рет пайдалануға болады.
6. Жинаққа 5 ауыстырылатын трахея шеміршектері кіреді, бұл студенттерге ауыстырылатын элементтерді ұзақ уақыт пайдалануға мүмкіндік береді.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Манекенды эксплуатацияға дайындау:

Пайдалану кезінде тренажер соққылардан қорғалуы керек.

Фломастер, сия қаламдарын, ацетонды, йодты және басқа да бояғыш заттар мен заттарды пайдаланбаңыз, жаттықтырушыны газет бетіне немесе боялған беттерге қоймаңыз. Пайдалану кезінде тренажер соққылардан қорғалуы керек.

1. Тренажерді артқы жағыңызда тегіс, көлденең бетке орнатыңыз.
2. Модельді талькпен өңдеңіз және трахея сақиналарын мойынның алдыңғы жағындағы ойыққа салыңыз.
3. Тесуге дайындалу үшін теріні жаттықтырушыға бекітіңіз.