



**Жүкті егіздерді тексеру дағдыларын  
жаттықтыруға арналған «Афродита-05»  
симуляторын оқытушыларға арналған  
пайдалану бойынша әдістемелік нұсқаулық  
(P10611).**

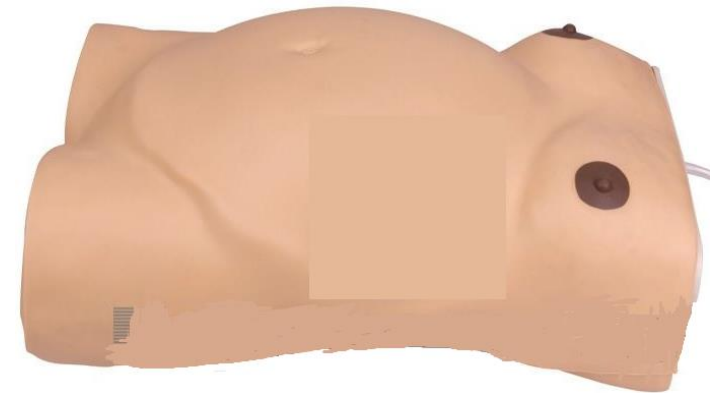


|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН<br>MEDISINA<br>АКАДЕМИАСЫ<br>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ |  |  SOUTH KAZAKHSTAN<br>MEDICAL<br>ACADEMY<br>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» |  |
| Тәжірибелік дағдылар орталығы   |  | 044/28-   |  |
| Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық   |  |   |  |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН<br>MEDISINA<br>АКАДЕМИАСЫ<br>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ |  |  SOUTH KAZAKHSTAN<br>MEDICAL<br>ACADEMY<br>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» |  |
| Тәжірибелік дағдылар орталығы   |  | 044/28-   |  |
| Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық   |  |   |  |

ТДО отырысында қаралды

Хаттама № 8 12 04 2022 ж.

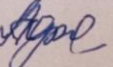ТДО басшысы:  Алимбеков М.Е.

### Жұмысты аяқтау.

Жұмысты аяқтағаннан кейін:

1. Тренажерды өшіру;
2. Тренажерді сабынды жылы суға малынған таза шүберекпен сүрту қажет;
3. Тренажерді мұқият құрғатыңыз;
4. Тренажерды құрғақ және желдетілетін бөлмеде сақтаңыз.

### Жабдық:

| № | Атауы                 | Өлшем бірлігі | Саны |
|---|-----------------------|---------------|------|
| 1 | Тренажер              | дана          | 1    |
| 2 | Қуат көзі 12V         | дана          | 1    |
| 3 | Тальк                 | дана          | 1    |
| 4 | Медициналық қолғаптар | дана          | 1    |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН<br>MEDISINA<br>АКАДЕМИАСЫ<br>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ |  | SOUTH KAZAKHSTAN<br>MEDICAL<br>ACADEMY<br>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» |  |
| Тәжірибелік дағдылар орталығы   |  | 044/28-  |  |
| Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық   |  |  |  |

## Пайдалануға дайындау.

Тренажерді пайдалануға дайындау:

Жұмыс кезінде симулятор соққылардан қорғалуы керек.

Фломастер, сия қаламдары, ацетон, йод және басқа бояғыштар мен заттарды пайдаланбаңыз, симуляторды газет қағазына немесе кез келген боялған бетке қоймаңыз. Тренажер материалы бояғыштарды сіңіру мүмкіндігіне ие.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН<br>MEDISINA<br>АКАДЕМИАСЫ<br>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ |  | SOUTH KAZAKHSTAN<br>MEDICAL<br>ACADEMY<br>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» |  |
| Тәжірибелік дағдылар орталығы   |  | 044/28-  |  |
| Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық   |  |  |  |

**Атауы:** Жүкті егіздерді тексеру дағдыларын жаттықтыруға арналған «Афродита-05» симуляторы.

**Кіріспе:** Антенатальды тексеру өте маңызды, өйткені ол нәрестенің және одан кейінгі баланың денсаулығына кепілдік беруге мүмкіндік береді. Бұл тренажер антенатальды тексеру процесіне сәйкес жасалған. Тренажер жүкті әйелді, егіздерді тексеру дағдыларын дамытуға арналған. Тренажер шынайы көрініспен ерекшеленеді. Тренажер - жаттығудың тамаша құралы. Ол орта және жоғары медициналық оқу орындарында қолданылады.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН<br>MEDISINA<br>АКАДЕМИАСЫ<br>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ |  | SOUTH KAZAKHSTAN<br>MEDICAL<br>ACADEMY<br>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» |  |
| Тәжірибелік дағдылар орталығы   |  | 044/28-  |  |
| Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық   |  |  |  |


### Сипаттамасы:

1. Шынайы көрінетін және сенсорлық материалдар.

2. Сыртқы акушерлік тексеру әдістерінің тәжірибесі (Леопольд Левицкийдің төрт қабылдауы). Сезімнің шынайылығын арттыру үшін резеңке шамды пайдаланып, іш қуысын ауамен толтыруға болады.

3. Жүкті әйелдің іш қуысын аускультациялау дағдыларын жаттықтыру. Студенттер егіздердің жүрек дыбыстарын стетоскоппен немесе сыртқы динамик арқылы ести алады.

4. Дыбыс деңгейін және жүрек соғу жиілігін реттеу. Параметрлер бір-бірінен тәуелсіз ұрықтардың әрқайсысы үшін өзгертіледі. Басқару тақтасындағы параметрлерді өзгертуге болады.

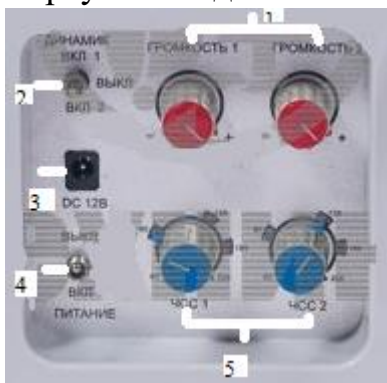

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН<br>MEDISINA<br>АКАДЕМИАСЫ<br>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ |  | SOUTH KAZAKHSTAN<br>MEDICAL<br>ACADEMY<br>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» |  |
| Тәжірибелік дағдылар орталығы   |  | 044/28-  |  |
| Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық   |  |  |  |

1. дыбыс деңгейін басқару элементтері
2. Дыбыс режимінің қосып, өшіру
3. Қоректендіру блогы разъемы үшін ауыстырыңыз
4. Тренажерды қосып, өшіру
5. №1 және №2 ұрықтың жүректің соғу жиіліктерін реттеушілер (60-тан 200-ге дейін)

Дыбыс режимін орнату үшін қосқыш үш түрлі жағдайда болуы мүмкін:

- 1) ҚОСУ 1 - сыртқы колонкадағы №1 ұрық аускультациясының дыбысын қайталау.
- 2) ӨШІРУЛІ – жеміс ішіне орнатылған динамиктегі аускультация дыбысын бір уақытта ойнату.
- 3) ҚОСУ 2 - сыртқы колонкадағы №2 ұрық аускультациясының дыбысын қайталау.