

**АСД 125 Автоматты сыртқы дефибриллятор  
тренажерін пайдалану бойынша оқытушыларға  
арналған әдістемелік нұсқаулық**

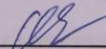


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

ТДО отырысында қарастырылды

Хаттама № 5 08 12 2020 ж.

ТДО басшысы  Абдраимова С.Е.

6	Электродтар (балаларға)	дана	1
7	Электродтар (ересектерге)	дана	1
8	Нитрилды қолғаптар (2 дана)	жұп	1
9	Бір реттік қауіпсіздік ұстара	дана	1

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

3. Дауыс нұсқауларына сүйене отырып, таңдалған сценарий бойынша тренажермен жұмыс жасаңыз.

### Жұмысты аяқтау:

1. Қуатты өшіргеннен кейін, коннектордың блоктан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Егер блокта кір болса, оны жұмсақ, дымқыл шүберекпен, сумен немесе бейтарап жуғыш затпен ақырын сүртіңіз
3. АНД тренажерының блогына сұйықтық тигізбеңіз.
4. Шаңның түсуіне жол бермей, төсеніштердің гель жағын таза ұстаңыз.
5. Пайдаланғаннан кейін жапсырмаларды түпнұсқа корпусқа жабыстырыңыз.
6. Жапсырмалардың гельдік жағын қағазбен немесе матамен сүртуге тыйым салынады.
7. Жапсырмалардың гельдік жағынан кірді тырнақпен немесе щеткамен тазалауға тыйым салынады.
8. Жапсырмаларды жиі жууға тыйым салынады, жуғыш заттар мен ыстық суды пайдалануға тыйым салынады.

### Жинақ:

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	АСД блок симуляторы	дана	1

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

**Атауы:** АСД 125 Автоматты сыртқы дефибриллятор симуляторы.

**Кіріспе:** АСД 125 Автоматты сыртқы дефибриллятор симуляторы шұғыл көмек көрсету дағдыларын тиімді жаттықтыруға арналған. Бұл тренажер пайдаланушыға дефибрилляция дағдыларын игеруге мүмкіндік беретін және жедел көмек көрсету кезінде қажетті негізгі әдістерді жасауға мүмкіндік беретін көптеген алдын-ала орнатылған сценарийлерді ұсынады.

АСД 125 симуляторында жаттығу сабақтарын өткізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін Жоғары кернеу пайдаланылмайды, бұл электр тогының соғу ықтималдығын жояды.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

## Сипатамасы:

### АСД тренажерының негізгі блогы.

#### 1. ЭЛЕКТРОДТАРДЫ ЖАЛҒАУҒА АРНАЛҒАН ҚОСҚЫШ

Оқу электродтарының штепселін электродтарды жалғау коннекторына қосыңыз.

#### 2. КҮЙ КӨРСЕТКІШІ

Жалғау кабелі қосылмаған кезде баяу жыпылықтайды.

#### 3. ON/OFF ТҮЙМЕСІ

Құрылғы мен дауыстық кеңестерді қосыңыз. Қосу үшін бірнеше секунд ішінде бір рет басыңыз. Ажырату үшін қайтадан басыңыз.

#### 4. ДИНАМИК

Дыбыстың ойнатылуы.

#### 5. ТҮСІРУ ТҮЙМЕСІ

Шок разряд тренажерын қосу. Құрылғы түсіруге дайын болған кезде батырма мен СКД экраны жанады.

#### 6. ЖК–ДИСПЛЕЙ

Жұмыс режимдері, таңдалған сценарий нөмірі, батарея зарядының ағымдағы жағдайы, Кеңестер және т. б. туралы ақпаратты көрсетеді.

#### 7. СЦЕНАРИЙДІ ТАҢДАУ

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

10 дайын сценарий бар.

8. ИК сигналдарын қабылдағыш (қашықтықтан басқару пульті)

9. КЕҢЕС ЖҮЙЕЛІЛІГІ

1 – қосу, 2 – сценарийді таңдау, 3 – разрядты орындау

10. АУДИОШЫҒЫС

АСД тренажерына кез-келген сыртқы дыбыстық шығыс құрылғыларын қосуға болады.

11. ЗАРЯДТАУ КӨРСЕТКІШІ

Қызыл түс (зарядтау жүріп жатыр), жасыл түс (зарядталған)

12. ҚУАТ ҚОСҚЫШЫ

АСД симуляторын желіден қосу үшін адаптерды қолданыңыз.

13. ТІЛДІ ТАҢДАУ

Орысша/Ағылшынша

14. КІДІРТУ/БАСТАУ

Кідірту функциясы құрылғының барлық әрекеттерін уақытша тоқтатуға мүмкіндік береді. Кідірту үшін бір рет басыңыз. Жалғастыру үшін тағы бір рет басыңыз.

15. ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІН БАСҚАРУ

Оқу барысында дауыстық шақырулардың дыбыс деңгейін реттеу.