



**Асқазанды жуу дағдыларын жаттықтыруға  
арналған Сема тренажерін пайдалану бойынша  
оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық  
(Р10340).**

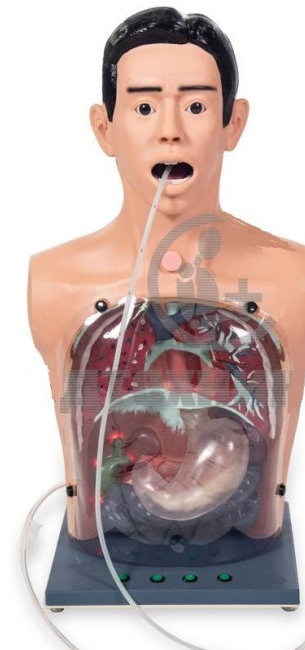


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

ТДО отырысында қаралды

Хаттама № 8 12 04. 2022 ж.

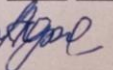ТДО басшысы:  Алимбеков М.Е.

### Жабдық:

№	Атауы	ед.өлшемі	саны
1	Мөлдір кеуде қабырғасы бар адамның денесі	дана.	1
2	Асқазан Зонд	дана.	1
3	Гельді майлау	дана.	1
4	Түтік қысқышы	дана.	1
5	Сұйық қап	дана.	1
6	Батарейлар түрі «АА»	дана.	2


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық	

Өт қабын, көпіршік жолын, бауыр жолын, жалпы өт жолын және жарық бақылау жүйесі бар он екі елі Ішекті құрғату рәсімін көрсету.

### Жұмысты аяқтау:

Сабақ аяқталғаннан кейін:

1. Оқу процедурасы аяқталғаннан кейін-мұрын түтігі арқылы тамақтандыру және асқазанды шаю-асқазан мен ішектен қалған сұйықтықты алып тастау керек.
2. Батарейкаларды алып тастау.
3. Егер өнім ұзақ уақыт пайдаланылмаса, қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оны таза сүртіп, орап, құрғақ, салқын жерге қою керек.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық	

**Атауы:** Асқазанды жуу дағдыларын жаттықтыруға арналған Сема тренажері (P10340).

**Кіріспе:** асқазанды шаю дағдыларын дамытуға арналған Манекен медициналық көмек дағдыларын дамытуға және медициналық қызметкерлерді оқытуға арналған оқу-практикалық құрал болып табылады. Бұл адамның жоғарғы денесін бейнелейтін манекен, оның алдыңғы жағы клиникалық операцияларды жүргізу кезінде қажет болатын мөлдір пластиктен жасалған. Ол болттармен түсінілуі және жиналуы мүмкін, кеуде қуысында, іш қуысында және ауыз қуысында ішкі ағзалардың орналасуы мен морфологиялық құрылымын көзбен байқауға болады. Жарық жүйесі бар бұл манекен өт қабы мен он екі елі ішектің дренажын, қарыншалық зондты және асқазанды шаю процедурасын еліктей алады. Манекен клиникалық көріністі шынайы және сенімді түрде еліктейді. Кедергісі, ол қарсы түтік асқазанды жуу үшін енгізу кезінде, конденсаторы, ол байқалады, осы адами теле. Манекен медициналық колледждерде, кәсіптік медициналық училищелерде, медициналық ЖОО-ларда және өзге де медициналық мекемелерде студенттер мен медициналық персоналды практикалық сабақтарға, рәсімдерге және оқытуға арналған.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық	

## Сипаттамасы

1. Ауыз қуысының күтімі
2. Мұрын-жұтқыншақ түтігі арқылы қоректену

3. Асқазанды шаю: асқазанды шаю үшін түтікті енгізу дағдыларын пысықтау және асқазанды шаю рәсімдері

4. Зертханалық тексерулер: асқазанның ішіндегісін алу және он екі елі ішектің зондтау, асқазан-жолын декомпрессиялау және асқазан мен ішек баллондарын үш түсті өлексемен үрлеу дағдыларын пысықтау

5. Ауыз қуысы, кеуде қуысы және ішкі ағзалардың орналасуы мен сұлбасы, оның ішінде таңдай төбешіктерінің, бронхтардың, өкпелердің, асқазанның, ұлтабардың, өт қабының, өт қабығының ағымы, бауырдың және жалпы өт өзегінің орналасуы мен сұлбасы болуы мүмкін. жай көзбен көреді.

6. Өт қабығы, бауыр ағымы, өт қабығының ағымы жалпы өт жолы ағымы он екі елі ішекті процедурасын орындауға болады. Жарықтық жүйе арқылы жүргізуге болады.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық	

## Манекенді пайдалануға дайындау:

Асқазанды шаю процедурасы науқастың денесінің отыратын және жататын және басқа позицияларында да жүргізілуі мүмкін.

Асқазанды шаю процедурасына еліктеу әр түрлі жолдармен жүргізілуі мүмкін - мысалы, зондпен жуу (асқазан зондын алдын-ала дайындалған вазелин майымен майлаңыз, мұрын арқылы 45-50 см зондты енгізіңіз), электрлік сорғышпен асқазанды шаю. Егер асқазанды жууға арналған зондты енгізу процедурасы дұрыс орындалса, асқазанның құрамына еліктегіш пайда болады (өйткені асқазанның құрамына еліктеу тасымалдауға жатпайды, оны өзіңіз дайындаңыз). Операцияны қайталай отырып, көлемі 300-500 мл болатын асқазанды шаю үшін сұйықтық құю керек. Жуылған сұйықтық шығатын түтіктің Шығыс саңылауы арқылы төгіледі. Асқазанды шаю процедурасының соңында асқазанның қалған құрамын шығару түтігі арқылы құю керек. Асқазан сөлін алу және он екі елі ішектің зондтау, асқазан-ішек жолының декомпрессиясы және асқазан мен ішек баллондарын үш түсті мейітпен үрлеу дағдыларын пысықтауға болады.