

**«НПФ-Медтехника» ВШВ-2 иммобилизациялық
вакуумдық шиналарын пайдалану бойынша
оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқау**



ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казакстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казакстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ТДО отырысында қарастырылды

Хаттама № 5 08 12 2020 ж.

ТДО басшысы AB Абдраимова С.Е.

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	Вакуумды шиналар	дн.	2
2	Қолмен вакуумдық сорғы	дн.	1
3	Тасымалдаушы сөмке	дн.	1

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

2. Шинадағы қысым өшкеннен кейін ілгектер түймеленеді және бұйым аяқ-қолынан алынады.
3. Шиналарды дезинфекциялық ерітіндіге малынған таза шүберекпен сүртіңіз, қажет болған жағдайда кірді ағынды сумен шайыңыз.
4. Беруге кептіруге.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Атауы: ВШВ-2 вакуумдық иммобилизациялық шиналары.


Кіріспе: Бұл шиналар жіліншік, табан, білек сүйектерінің сынуына, шынтақ және тізе буындарының зақымдануына күдіктенген кезде, жарақат алған жерден емдеу мекемесіне дейін тасымалдау кезінде зақымдалған аяқ-қолдардың қозғалмауын (иммобилизациясын) жасау үшін сыртқы қан кетумен аяқ-қолдардың жұмсақ тіндері зақымданған кезде қолданылады. Жарақат кезінде алғашқы көмек көрсету дағдыларын дамытуға арналған.

Жинақтау:

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

Сипаттамасы:

1. Шиналар полимерлі материалдан жасалған.
2. Шиналардағы ең жоғары жұмыс разряды - 20 мм. сн.б.
3. Олар жылу оқшаулау қасиеттеріне ие және рентген сәулелерін жақсы өткізеді.
4. Бірнеше рет қолдану мүмкіндігі бар.
5. Олар кез-келген қажетті позицияда дененің жеке пішінін керемет өзгерту және қабылдау қабілетіне ие.
6. Қанның дұрыс айналымына кедергі жасамайды.
7. Тазалау және дезинфекциялауға оңай.
8. Қолмен қолданатын вакуумдық сорғымен жабдықталған.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

Шиналарды қолдану тәртібі :

Шиналарды салу киім мен аяқ киімді шешуді талап етпейді.

Ашық сынықтар немесе кесулер кезінде алдымен жараға стерильді таңғышты, содан кейін шинаны салу керек.

Шина аяқ-қолға қолданылады және тоқыма бекіткішімен (Velcro) бекітілген белдіктермен бекітіледі.

Вакуумдық сорғы қосылады, кіріс – шығыс кранының жабылуы тексеріледі және аяқ-қол бекітілгенге дейін ауа сорылады, содан кейін жәбірленуші тасымалдануы мүмкін.