

**Қуық асты безін тексеру дағдыларын
жаттықтыруға арналған тренажерының (9
ауыстырылатын модуль) қолдану бойынша
оқытушыларға арналған нұсқаулық (Р63)**




ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ТДО отырысында қаралды
 Хаттама № 4 10 12 2024 ж.
 ТДО басшысы:

Калменов Н.Д.

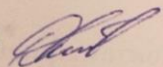

Жабдық:

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	Тренажер	дана	1
2	Қуық асты безі кезеңінің модуль жинағы (9 дана)	дана	1
3	Резеңке қолғаптар	қорап	1

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

кезеңді қарастырады. А(I) сатысында без ұлпасының без гиперплазиясының шағын ошақтары кездеседі; Ең оңай анықталатын В (II) сатысының ісігі С (III) сатысында қуық асты безінің капсуласында локализацияланған, ісік қуық асты безінен асып, көрші мүшелерге, мысалы, қуық мойнын, D (IV) кезеңдегі метастаздар жамбас лимфа түйіндерінде немесе алыстағы метастаздарда қалыптасады.

Жұмысты аяқтау:

Жұмыс аяқталғаннан кейін:

1. Машинаны жылы, сабынды суға малынған таза шүберекпен сүртіңіз;
2. Тренажерды мұқият құрғатыңыз;
3. Тренажер мен оның компоненттерін жинап, құрғақ, желдетілетін бөлмеде сақтаңыз.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

Атауы: Қуық асты безін тексеру дағдыларын жаттықтыруға арналған тренажер (9 ауыстырылатын модулімен) (Р63).

Кіріспе:

Тренажер қуық асты безін практикалық тексеруге арналған және 9 модульді қамтиды. Тренажер медициналық университеттерде, колледждерде, ауруханаларда және басқа да медициналық мекемелерде пайдалануға жарамды. Қуық асты безін тексеру дағдыларын жаттықтыруға арналған. Кеңейтілген тәжірибе студенттерге мейірбике күтімі мен процедуралық дағдыларын жетілдіруге мүмкіндік береді. Тері шынайы сезім беретін полимерлі материалдан жасалған.

Сипаттамасы:

1. Тренажер қуық асты безі ауруларын диагностикалау және емдеу дағдыларын үйрену үшін пайдаланылуы мүмкін.
2. Ректальды тексеру дағдыларын жаттықтыру үшін қолдануға болады.
3. Тоғыз ауыстырылатын қуық асты безі модулімен аурулардың әртүрлі кезеңдерін иммитациялауға мүмкіндік береді.
4. Қалыпты қуық асты безі модулін оқыту және оны қуық асты безі аурулары модульдерімен салыстыру үшін пайдалануға болады.


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	044/28-
Тәжірибелік дағдылар орталығы		
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

5. Тренажерды ұстаған кездегі сезімдер шынайылыққа жақын.

6. Студенттер қай модуль орналасқанын білмеуі керек.

Тренажер негізгі корпустан және тоғыз ауыстырылатын қуық асты безі модулінен тұрады.

Негізгі корпусы

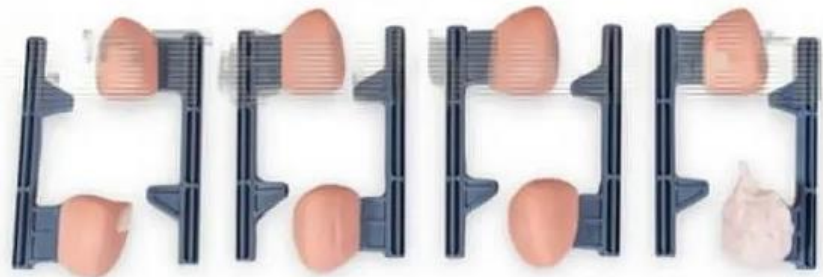

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	044/28-
Тәжірибелік дағдылар орталығы		
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

простатит

қалыпты

қуық асты безі қатерлі ісігінің 1 сатысы

қуық асты безі қатерлі ісігінің 2 сатысы

қуық асты безі қатерлі ісігінің 3 сатысы

қуық асты безі қатерлі ісігінің 4 сатысы

қуық асты безінің абсцесі

бір жақты қуық асты безі гиперплазиясы

екі жақты қуық асты безі гиперплазиясы

Тренажерді пайдалануға дайындау:

1. Сұқ саусақтың майланған ұшын анус арқылы тік ішекке ақырын енгізіңіз, тексергенде қуық асты безінің мөлшерін бағалаңыз, оның тығыздығы байқалады: безі тығыз консистенциялы, беті тегіс, тығыздағыштар жоқ, ортаңғы ойығы күрт байқалмайды, бөліктері симметриялы (2-сурет)

2. Жалпы клиникалық ауруға имитациялау моделі: қуық асты безінің ұлғаюы (бір жақты; екі жақты), ұлғайған қуық асты безі пальпацияланады, ортаңғы ойық тегістелген, бір немесе екі жақтан ұлғаю байқалады. Бір немесе екі бөлікте қуық асты безі абсцесі байқалады, ассиметрия, салбырау, орталығы анық емес; ; 3. Модельде қуық асты безі қатерлі ісігінің клиникалық сатыларына сәйкес келетін төрт