


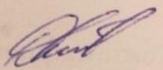
**Тістері бар жақтың стандартты моделін қолдану
бойынша дағдыларды жаттықтыруға арналған
оқытушыларға арналған нұсқаулық
(PAR 01)**



ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		28/07-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		28/07-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ТДО отырысында қаралды
 Хаттама № 4 10 12 2024 ж.

ТДО басшысы: Калменов Н.Д. 

Жабдық:

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	Модель	дана.	1
2	Бұрағыш	дана.	1

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		28/07-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Жұмысты аяқтау.

Жұмысты аяқтағаннан кейін:

1. Қаптаманы жылы, сабынды суға малынған таза шүберекпен сүртіңіз.
2. Құрғатыңыз.
3. Модельді желдетілетін бөлмеде сақтаңыз.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		28/07-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Атауы: Тістері бар жақтың стандартты моделі (PAR 01).

Кіріспе: Модель-ересек адамға тән тіс-жақ аппараты. "Nissin" түрі.

Модельдің негізі қатты пластмассадан жасалған, қызыл иек жұмсақ, қызғылт түсті, 28 модульдік тістері бар, тік тамыры бар, модельде бұрандалы бекіту арқылы бекітілген. Тістердің құрылымы (тәждер мен шайнау беттері) табиғи тістерге сәйкес келеді.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		28/07-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Сипаттамасы:

Тістер РНО - РНІ саңылауы бар бұйра бұрағышпен оңай бекітіледі және алынып тасталады.

Төменгі және жоғарғы негізде модельдер орнатылған модельді фантомдық басына бекіту үшін МБ бұрағышы бар металл тақтайшалар, сонымен қатар магниттік монтаждау тақтасының көмегімен бекітілуі мүмкін.

Модель стоматологияда, орта және жоғары медициналық оқу орындарында оқыту және тәжірибелік дағдыларды дамыту кезінде пациенттің тіс-жақ аппаратын имитациялауға арналған.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		28/07-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Тренажерді пайдалануға дайындау:

Жұмыс кезінде тренажер соққылардан қорғалуы керек.

Киізден жасалған қаламдарды, сия қаламдарын, ацетонды, йодты және басқа бояғыш заттар мен заттарды пайдаланбаңыз, тренажерды газет қағазына немесе боялған беттерге қоймаңыз