

**Дененің жоғарғы бөлігіне таңғыш таңу дағдысын
үйренуге арналған тренажерды (P13) пайдалану бойынша
оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық**



ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулықтар			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулықтар			

ТДО отырысында талқыланды
 Хаттама № 20 18.10 2021 ж.
 ТДО басшысы: Алимбеков М.Е. Алимбеков М.Е.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулықтар			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулықтар			

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	Тренажер	дана	1
2	Таңғыш	дана	4
3	Бандаж	дана	1
4	Сақтау және тасымалдау сөмкесі	дана	1

Атауы: Дененің жоғарғы бөлігіне таңғыш таңу дағдысына арналған (P13) тренажеры.

Кіріспе: Жоғарғы аяқ-қолды таңудың соңғы үлгідегі тренажеры, жоғарғы аяқтың екі жақты ампутациясы бар науқасты модельдейді. Иықтың төменгі үштен бір бөлігінде оң қолы кесілді. Ампутацияланған аяқтың діңін байлау дағдыларын игеру үшін қолданылады. Тері тегіс, жұмсақ, құрғақ және берік, бұл лейкопластырьды бекітуге мүмкіндік береді. Тренажер ПВХ -тен жасалған. Тренажер медициналық білім беретін жоғары және орта арнаулы оқу орындарында, сондай -ақ аурухана дәрігерлері қызметкерлерді бинт қоюға көрсету және үйрету үшін қолданады.

Сипаттамасы:

- 1.Тренажер жоғарғы аяқтың екі жақты ампутациясы бар науқасты модельдейді;
2. Оң қол білектің жартысын кесіп, ал сол қол шынтак буынына дейін кесілген; модельді культті ампутацияланған мүшеге таңғыштарды қолдану дағдысын алу үшін қолдануға болады;
3. жаттығу құралы іш қабырғасына таңғыш қоюға ыңғайлы;

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулықтар			

4. Дөңгелек, спиральды таңғыш таңу үшін қолдануға болады; таңғыштар сегіз саны түрінде, сондай -ақ кеудеге таңғыш тағу үшін және т.б .

Манекенді пайдалануға дайындау:

Жұмыс кезінде тренажер соққылардан қорғалуы керек.

Фломастер, сия қалам, ацетон, йод және басқа бояғыштар мен заттарды пайдаланудан аулақ болыңыз, тренажерды газет қағазына немесе боялған бетке қоймаңыз. Тренажердың материалы бояғыштарды сіңіру мүмкіндігіне ие.

Тренажерді тегіс жерге орналастыру керек.

Таңғыштар жараны қорғау, ластануды азайту, аймақты бекіту немесе қан кетуді тоқтату үшін қолданылады. Әдетте бандаж және орамал таңғышы қолданылады. Таңу әдісіне қарамастан, тіндердің берік бекітілуіне және орташа қысылуына қол жеткізу қажет, ота асептика ережелерін сақтай отырып жүргізілуі керек екенін ұмытпаңыз

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулықтар			

Жұмыстың аяқталуы:

Жұмысты аяқтағаннан кейін:

1. Манекенды жылы сабынды суға малынған таза шүберекпен сүртіңіз;
2. Тренажерды мұқият құрғатыңыз;
3. Тренажерды құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.