


**Перкуссия мен пункция дағдыларын
жаттықтыруға арналған Гидро - ИПОЛИТ
тренажерын пайдалану бойынша оқытушыларға
арналған әдістемелік нұсқаулық (P10340).**

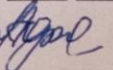


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ТДО отырысында қаралды

Хаттама № 8 12 04. 2022 ж.

ТДО басшысы:  Алимбеков М.Е.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Жабдық:

№	Атауы	Ед.өлшемі	Саны
1	Манекен	дана.	1
2	Іш қуысының қосалқы модулі	дана.	2
3	Плевра қуысының қосалқы модулі	дана.	2
4	Бауырдың қосалқы модулі	дана.	2
5	Жүректің қосалқы модулі	дана.	2
6	Сүйек кемігінің қосалқы модулі (оң және сол)	жинақ.	2
7	Орталық тамыр модульдерінің қосалқы жиынтығы (2 данадан 3 түр)	жинақ.	1
8	Шприц 5мл.	дана.	1
9	Сұйық қап	дана.	1
10	Қан симуляторы	жинақ.	1
11	Йод симуляторы	жинақ.	1

Атауы: Перкуссия мен пункция дағдыларын жаттықтыруға арналған Гидро - ИППОЛИТ тренажеры (P10340).

Кіріспе: ГИДРО-ГИППОЛИТ Манекен-симуляторы перкуссия мен пункция дағдыларын дамытуға арналған. Манекен сыртқы түрі мен жанасуы бойынша шынайы материалдардан жасалған, жұмсақ терісі бар. Манекеннің дәл анатомиялық белгілері бар:бұғана, бұғананың акромиальды ұшы, бұғананың кеуде ұшы, көкірек-бұғана- мастоидты бұлшықеттің бекітілген жерлері, қабырғалар, қабырға аралық кеңістіктер, кеуде үсті қуысы, ортаңғы бұғана сызығы, алдыңғы қолтықасты сызық, ортаңғы қолтықасты сызық, жұлын өсінділері , мықын сүйектері, кіндік және ішек сызығы, сүйір өсіндісі жаңбас сүйегінің қырқасы.

Сипаттамасы:

1.Перкуссия мен пункцияны жүргізуге болады, пункция кезінде "шапалақ дыбыс" әсері бар, асцит пен оны емдеуді имитациялауға болады.

2. Резеңке алмұрт көмегімен ұйқы және сан артериядағы пульстын сезілуі

3.Мойындырық, сан және бұғана асты тамырларды пункциялау.

4.Пункция модульдерін ауыстыруға болады.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Манекенді пайдалануға дайындау:

Жұмыс кезінде симулятор соққылардан қорғалуы керек.

Фломастер, сия қаламдары, ацетон, йод және басқа бояғыштар мен заттарды пайдаланбаңыз, симуляторды газет қағазына немесе кез келген боялған бетке қоймаңыз. Тренажер материалы бояғыштарды сіңіру мүмкіндігіне ие.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Жұмысты аяқтағаннан кейін:

1. Тренажерды өшіру.
2. Тренажерді сабынды жылы суға малынған таза шүберекпен сүрту қажет;
3. Тренажерді мұқият құрғатыңыз;
4. Тренажерды құрғақ және желдетілетін бөлмеде сақтаңыз.