


**Методические рекомендации для преподавателей  
по использованию анатомического тренажера для  
отработки  
навыков внутриматочной контрацепции (F5L).**

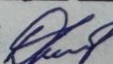

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

Рассмотрено на заседании ЦПН  
 Протокол № 4 от 13 12 2022 г.  
 Руководитель ЦПН:  Калменов Н.Д.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

### Комплектация:

№	Наименование	Ед.измерения	Количество
1	Тренажер	шт.	1

**Наименование:** Анатомический тренажер внутриматочной контрацепции (F5L).

#### Введение:

Этот тренажер разработан для обучения и тренинга манипуляции по установке и извлечению ВМК, базируясь на реальной анатомии женских половых органов. Тренажер предназначен для обучения установке и извлечению ВМК студентов медицинских колледжей, медицинских технологических академий, а также для клиницистов.

**Характеристика:** Тренажер характеризуется реалистичным внешним видом и реальными ощущениями при выполнении процедуры. Анатомические структуры включают лобковую кость, мочевой пузырь, матку, влагалище, малую и большую губы вульвы, прямую кишку, копчика и т.д.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

### **Подготовка симулятора к эксплуатации:**

При эксплуатации симулятор должен быть защищен от ударов.

Избегайте использования фломастеров, чернильных ручек, ацетона, йода и других красящих веществ и предметов, не укладывайте симулятора на газетную бумагу или любые окрашенные поверхности. Материал симулятора имеет свойства впитывать красящие вещества. Протирать тренажер чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

### **Завершение работы:**

После окончания работы:

1. Необходимо протирать симулятор чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой;
2. Тщательно просушивать тренажер;
5. Тренажер хранить в сухом, проветриваемом помещении.