

**Методические рекомендации для преподавателей  
по использованию модель введения  
внутриматочной спирали (ВМС) (F9E).**



Шымкент 2022

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

Рассмотрено на заседании ЦПН  
 Протокол № 4 от 13 12 2022 г.  
 Руководитель ЦПН:  Калменов Н.Д.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

### Завершение работы:

После окончания работы:

1. Необходимо протереть модель чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой;
2. Тщательно просушивать;
5. Хранить в сухом, проветриваем помещении.

### Комплектация:

№	Наименование	Ед.измерения	Количество
1	Тренажер	шт.	1

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

**Наименование:** Модель введения внутриматочной спирали (ВМС) (F9E).

**Введение:** Тренажер разработан в полном соответствии с нормальным анатомическим строением женских половых органов и благодаря прозрачной пластиковой крышке отображает строение матки на поперечном срезе. Тренажер отображает матку, яичники, маточные трубы и т. д. Модель позволяет напрямую продемонстрировать процесс установки и удаления внутриматочного контрацептива и отработать навык выполнения этих манипуляций. Благодаря реалистичному виду и правдоподобным ощущениям модель может использоваться в качестве тренажера для клинического обучения, в виде демонстрационного материала для обучения и практики студентов медицинских училищ, сестринских и гигиенических факультетов медицинских институтов. Также тренажер послужит идеальным средством демонстрации для практикующих врачей при разъяснения манипуляции своим пациентам.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

**Характеристика:** Благодаря прозрачной передней стенке модели можно напрямую увидеть весь процесс постановки и удаления внутриматочного контрацептива. Удерживайте модель одной рукой, а во вторую возьмите проводник, со вставленной в него внутриматочной спиралью, и введите в полость тела матки. Отработайте навык установки и удаления контрацептива.

### **Эксплуатация тренажера**

При эксплуатации модель должен быть защищен от ударов.

Избегайте использования фломастеров, чернильных ручек, ацетона, йода и других красящих веществ и предметов, не укладывайте симулятора на газетную бумагу или любые окрашенные поверхности. Материал симулятора имеет свойства впитывать красящие вещества.