


**Методические рекомендации для преподавателей  
по использованию манекен-симулятор для  
отработки навыков гинекологического и  
маммологического обследования Р10540 .**

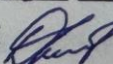

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

Рассмотрено на заседании ЦПН  
 Протокол № 4 от 13 12 2022 г.  
 Руководитель ЦПН:  Калменов Н.Д.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

### Завершение работы:

После окончания работы:

1. Необходимо протирать модель чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой;
2. Тщательно просушивать;
5. Хранить в сухом, проветриваем помещении.

### Комплектация:

№	Наименование	Ед.измерения	Количес во
1	Манекен (женский торс)	шт.	1
2	Набор модулей матки (3 шт)	шт.	1
3	Гель-смазка	уп.	1

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

**Наименование:** Манекен-симулятор для отработки навыков гинекологического и маммологического обследования.

**Введение:** Манекен – симулятор представляет собой торс взрослой женщины с симуляцией груди, живота и таза, специально разработанное для профессионального тренинга гинекологического и маммологического осмотра. Современный термопластик и пористый латекс делают модель очень мягкой, живой и эластичной.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

### Характеристика:

1. Исследование патологических изменений шейки матки (один модуль-норма и три с патологиями).
2. Пальпаторное исследование молочных желез (правая грудь-норма, левая с патологиями).
3. Замена модуля матки.
4. Реалистичные анатомические ориентиры (ребра ключицы).
5. Пальпаторное обследование лимфатических узлов (впаховой, подмышечной и ключичной областях).

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

### Эксплуатация тренажера

При эксплуатации модель должен быть защищен от ударов.

Избегайте использования фломастеров, чернильных ручек, ацетона, йода и других красящих веществ и предметов, не укладывайте симулятора на газетную бумагу или любые окрашенные поверхности. Материал симулятора имеет свойства впитывать красящие вещества.